

空气波压力循环治疗仪-空气波压力治疗仪

产品名称	空气波压力循环治疗仪-空气波压力治疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 规格:YLB-1 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

空气波压力循环治疗仪主要通过对多腔气囊有顺序的反复充放气，形成了对肢体和组织的循环压力，加压时，经组织间压力传导，组织液静水压显著升高，从而产生克服毛细血管内压及组织间胶体渗透压的作用，促进组织液静脉及淋巴管内回流。

由肢体的远端到肢体的近端进行均匀有序的挤压，促进血液和淋巴的流动及改善微循环的作用，加速肢体组织液回流，有助于预防血栓的形成、预防肢体水肿。

由肢体的近端到肢体的远端进行均匀有序的挤压，促进动脉血流动到肢端，帮助动脉缺血减轻，有利于增强动脉灌注，改善间歇性跛行。

通过均匀的压力按摩，且达到了所需压力值，可以加速血液中代谢产品的排除。可以防止肌肉萎缩，防止肌肉纤维化，加强肢体含氧量，有助于解决因血液循环障碍引起的疾病。

#空气波治疗仪能够直接或间接治疗与血液淋巴循环相关的诸多疾病。

1对于上，下肢体水肿：

上，下肢体的原发性和继发性淋巴水肿，慢性静脉源性水肿，脂性水肿，混合性水肿等。特别针对乳腺术后的上肢[淋巴水肿](#)，效果显著。治疗原理是促进血液循环，淋巴循环，将一些引起疼痛，不舒服的代谢产物和炎性致痛物质都挤到主循环里清除掉，从而消除水肿。

2对于偏瘫，截瘫及瘫痪的病人：

偏瘫，截瘫，瘫痪，长期卧床的患者，因血流缓慢，肌肉无收缩力，极易发生[下肢深静脉血栓](#)。瘫痪，[脊髓损伤](#)是[深静脉血栓形成](#)

的风险因素，有50-百分之百的机率会形成。预防治疗不当可能会导致肺栓塞危及生命，或者会导致下肢肿胀，溃疡，[皮肤色素沉着](#)

。应用空气波压力治疗仪，反复对肢体进行加压后再卸压，从而产生如同肌肉的收缩和舒张作用，促进静脉血液和淋巴液循环，并取得充分按摩效果，对预防[深静脉血栓](#)和防治下肢[肌肉萎缩](#)有重要意义。

3 对于[糖尿病足](#)，[糖尿病末梢神经炎](#)：

应用空气波压力治疗仪循序加压于病肢上，在加快静脉血液和淋巴组织液回流的过程中，可迅速地将淋巴液及静脉血液驱向肢体近心端，减低了肢端组织内压力，在气体排空的时间内，动脉供血迅速增强，这样就迅速改善肢体组织的供血供氧，并使代谢产物和炎性致痛物质得以清除，更加有利于下肢动脉缺血患者（糖尿病足，糖尿病末梢神经炎，[间歇性跛行](#)）的康复。

4 对于糖尿病足患者由于采用加压泵治疗增加了神经血流灌注和氧合作用，并且提高神经的氧耗量从而达到改善功能的目的，所以[肢体麻木](#)

症状明显减轻，皮肤感觉亦较治疗前敏感。通常做4，5次麻痛感就明显减轻或消失了。