

心电模拟仪维修必备工具SKX-2000A升级版

产品名称	心电模拟仪维修必备工具SKX-2000A升级版
公司名称	徐州铭昇电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	徐州市云龙区世茂广场A座726
联系电话	0516-83469046

产品详情

skx-2000a型 心电信号模拟器使用说明 1) 本充电器通过各种认证，输出电压4.2v，标准电流0.5a，极限电流0.6a，带有完善的过流、短路保护功能，充满后无需立即切断电源，不会过充。用料扎实，摒弃了低档电源用的13001（0.5a）三极管，直接采用了13003（1.5a）三极管，使得功率裕量非常足，即使在极端条件下也不会出现故障。 输出电压：4.2v 输出电流：500 ma（3.5圆孔插头）
输入电压：110v - 240v 2) 输出2根线，输出亮绿灯为正常待机状态，充电时为红灯，当充电电压达到4.16v左右红灯转为绿灯，此时充电器并非完全停止充电，而是以小电流涓流继续充电，最高截至电压为4.21v。该充电器带全套保护，所以怎么接线短路都不会损坏充电器的。 3) 指示灯状态表示：
绿灯为待机（充电时为4.16v涓流状态） 红灯为充电！ 闪绿灯为过电压4.21v
闪红灯为电池故障或短路 4) 充电器带短路，过流过压，正负极反接短路保护。 注意：
1、本模拟器上电后自动产生波形1的正常心电图波形。 2、为防止用户在使用过程中忘记关闭电源，系统设计为当24个小时后，cpu将进入待机状态，以便节电，再次开机将正常工作。 3、心电图机接法：ra-右手，la-左手，ll-左脚，rl-右脚，c1—c6胸导 4、监护仪接法：ra-右手（白色），la-左手（黑色），ll-左脚（红色），rl-右脚（绿色），c1—c6胸导（棕色） 5、三导联接法：ra-右手（白色），la-左手（黑色），ll-左脚（红色） 6、欧标对应接法：I-la r-ra rf(n)-rl f-ll c-v