

按摩器材/头部健脑按摩仪器/头部按摩仪

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 按摩器材/头部健脑按摩仪器/头部按摩仪 |
| 公司名称 | 深圳市泰康乐科技有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省深圳市 |
| 联系电话 | 0755-33072136 15814696455 |

产品详情

头部按摩仪/头部按摩器，健脑仪，欢迎广大新老客户来电来函咨询洽谈业务！

按摩的原理

按摩，是中国传统医学外治疗法的一种，是通过各种手法作用于体表的特定部位，以调节机体的生理，病理状况，达到保健强身的一种方法。

本产品使用脑全息电子按摩法。它的30个按摩点，直接作用于百汇、后顶、天柱等穴位。进行有效的按摩。刺激毛细血管扩张，促进血液循环，从而达到放松脑部神经，缓解脑疲劳，提高记忆力等功效。

一、产品的功能

- 1、缓解因长期脑力劳动造成的脑疲劳。
- 2、放松颈部肌肉。
- 3、缓解压力，提高记忆力。

二、注意事项

- 1、使用后和清洁前一定要拔去插头，拆下电池
- 2、不得在潮湿的地方使用。
- 3、如果出现问题，严禁自行维修，严禁继续使用，应尽快与经销商联系。
- 4、请勿将本产品置于潮湿的环境中，当产品外部潮湿时，切勿使用。
- 5、遇雷电和暴风雨天气时，请勿使用。

6、应避免导线受到踩踏或压折，插口、插座部位应受到重点保护。

7、避免本产品被挤压和碰撞。

三、紧急处理方法

1、万一本产品发生异样时，请先将电源开关关掉再将电源插头拔掉。

2、如内部机件发生故障，请送至本公司各地服务站，本公司提供热忱的售后服务。

3、若电源线损坏时，须由制造厂或服务处或具有类似资格人员更换，以避免危险。

四、适用人群

12岁以上（含12岁）之健康人群

五、警告

1、12岁以下的儿童禁止适用本产品

2、头部外伤未痊愈，两年内接受过头部手术治疗的人群和其他脑病患者禁止适用本产品。

3、本产品为保健产品，禁止用于医疗及其辅助治疗用途。

4、请勿擅自折拆、改动本产品

六、技术参数

工作电压：DC4.5V 振动功率：DC5V 振动频率：0-60Hz可变 毛重：850g 净重：485g

产品信息的最最终解释权归本公司，欢迎来电咨询！