

# 河南鸿达无针美塑

产品名称	河南鸿达无针美塑
公司名称	鸿达美容美体
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市北下街M3特区15号89号
联系电话	0371-53788326 13283809022

## 产品详情

无针美塑仪器原理介绍：

爱美是人类的天性，但是有不少爱美人士对医疗美容有恐惧心理，对医疗美容最大的疑问就是“经常整形美容手术会留下伤疤吗？”，他们并不是不向往美，而是怕美丽之后又留不可磨灭的伤痕。郑州鸿达美容美体仪器公司专业为爱美人士研究的一款安全，无痛的美容仪器让爱美的你没有后顾之忧。

无针美塑是全面替代传统注射美塑（有针和微针）的高效、无创，安全的“中胚层导入美容疗法”。采用最新水电泳和水通道蛋白新技术向中胚层导入各种活性成分，并辅以柔光和冰封刺激，采用“点到面”超微渗透技术，多点、均匀、全面、深入的把高能量原生液，直接输送到所需的皮肤组织，让含有多种营养及活性成分的高能量原生液，迅速被肌肤组织吸收，发挥作用，从而产生疗效，促进皮肤新陈代谢，保持皮肤弹性和姣美

美容仪器四大核心技术：

A．柔光刺激技术：分别作用于肌肤浅表层和深表层柔光，提高细胞渗透性，增强血液循环

，刺激细胞能量，加快胶原母细胞的繁殖。红光（685nm）穿透不深，它所有的能量都消耗在表皮层。红外光

（830nm）穿透更深红光和红外光主要是刺激真皮血管的形成、增强血液循环，帮助带走脂肪、糖份和蛋白质新陈代

谢产生的废弃物;同时，增加细胞膜的通透性，利于活性成分的渗透。

B．电穿孔技术：直接作用于皮肤，瞬间增强皮肤组织的可渗透性。在电击的作用下，细胞的脂质二重层上形成电击孔（因电击而产生的洞）。在电击孔形成的同时，使得原先无法被细胞吸收的亲水性分子能够穿透并进入细胞内部。电击孔一旦形成，则根据电击的长度，在数秒钟至数分钟之内保持打开状态。

C. 电渗透技术：主要作用于将要分散的物质分子，帮助其顺利穿透并进入肌肤内部，性质相同的电荷相互排斥，因此对正极的营养分子施加正电流，可将营养分子推入皮肤组织。此时，中性分子也一道穿透并进入肌肤内部。

D. 冰封刺激技术：借助外界温度的冷热交替使美容品的精华与疗效以最大限度地发挥。让营养成分迅速渗透到达皮肤基层与真皮层之间，分解抑制黑色素的同时，供给大量水分及营养成分，改善胶原纤维的弹性，用冷热交替温差的物理作用，达冰疗补水，深度锁水，冰疗抗敏，增强免疫，冰疗催化，高度吸收，冰疗控油，紧实皮肤

### 三. 配件的操作功能说明（最新美容仪器推荐）

1. 柔光操作头：把面部彻底清洗干净后，在面部涂抹美白补水的精华素，然后用柔光操作头正对需要护理的皮肤部位，进行照射，时间大约为5分钟，主要作用是主要是刺激真皮血管的形成、增强血液循环，帮助带走脂肪、糖份和蛋白质新陈代谢产生的废弃物;同时，增加细胞膜的通透性，利于活性成分的渗透。

2. 电泳注入枪：根据客户的护理需要，配合不同的美白和去皱产品进行电泳注入，主要作用是带开细胞内部的分子结构，是皮肤形成完全打开状态。具体操作方法是当产品通过注射枪打到皮肤上后，用打圈的方法，在需要护理的皮肤表面进行平滑来回的移动

3. 电渗操作头：在皮肤处于完全打开的状态后，用电渗操作头在皮肤表面用打圈的方法顺着皮肤的纹路进行轻微的挤压和平滑移动。主要作用是将皮肤需要的水分和营养物质送到皮肤的深层，以便皮肤完全吸收。

4. 冰封操作头：最后把皮肤清洗干净，涂抹上补水滋润的产品，用冰封操作头，在皮肤上移动和挤压，主要作用是通过冰疗技术作用于皮肤，来收缩毛孔，锁定皮肤的水分和营养物质。流量统计 1  
面部肌肤重整改善 (1)油性、毛孔粗大、角质层厚。净化皮肤，祛除多余厚实的角质，分解毛孔油脂，畅通及收缩毛孔，恢复明镜柔滑的肌肤

(2)肤色暗沉、疲倦、苍白、水肿，活氧肌肤，加速氧气吸收，改善循环暗哑

(3)成熟型、松弛、缺水、除皱、干燥。提升紧肤，收紧松弛的肌肤，深层补冲水分，刺激胶原蛋白的生成

#### 2.2. 眼部护理：

消除黑眼圈，眼袋，眼部细纹，缓解水肿，消除眼疲劳

#### 3. 纤体护理：

1) 蜂窝组织、击退蜂窝组织、平滑身体肌肤

2) 水肿、消退水肿轻浮、改善血管、淋巴循环

3) 瘦身后皮肤松弛、紧实松弛皮肤、提升收紧

### 七 无针美塑美容仪器属于光学美容仪器所以在使用的時候应该做到以下注意事项：

1 皮肤有伤口者，避免伤口或不做

2 患有精神症者禁做

3 心脏病患者（如心律不齐者）疼别是带有心脏起搏器者禁做

4 癌症患者禁做 5 传染病患者禁做 6 孕妇禁做

7 重大手术患者、糖尿病患者禁做 8 有任何金属在体内者禁做

八 技术参数：电源电压:AC110V 220V 2330V 240V 工作频率：50-60HZ

工作功率：25w 外箱尺寸：117\*61\*55CM 重量：26kg

机壳材料：采用的是ABS材料，防静电、防辐射、不变型等。

鸿达（郑州）美容美体设备有限公司 长期供应:美容仪器、减肥仪器、丰胸仪器、减肥机、丰胸仪、美胸仪、健胸仪、减肥仪、瘦身毯、皮肤测试仪、振脂机、远红外线太空舱、减肥设备、丰胸设备、美容设备、、、远红外线溶脂毯、远红外线溶脂灯、排毒仪、塑身仪、手诊仪、虹膜仪、多功能美容仪、、美颜专家、深层活细胞美容美体仪、、美容仪器、美体仪器、远红外线加热腰带、远红外线加热手套、加热带振动手套、

地址：郑州市北下街15号M3特区89号（二七广场向东100米）咨询热线：0371-53788326 13303826015

QQ：2387561297 邮箱：[hongdameirong@163.com](mailto:hongdameirong@163.com). 网站：<http://www.hnhdmr.com>