

犬瘟热病毒快速检测卡

产品名称	犬瘟热病毒快速检测卡
公司名称	苏州艾瑞德生物科技有限公司
价格	.00/条
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区东吴北路31号吴中科技创业园B幢201室
联系电话	0512-68796311 15850166981

产品详情

【摘要】

犬瘟热，俗称狗瘟，是由犬瘟热病毒引起的一种烈性传染病。临床特征为双相热型、消化道、呼吸、眼、鼻流出脓样分泌物，少数病例可发生非化脓性脑炎。多发生于3-6个月龄幼犬，青年犬也有感染，潜伏期为3-6天。病毒单独感染症状轻微，若继发细菌感染症状加重，病死率较高。【检测原理】

本试纸为免疫层析法对病毒进行双抗体夹心检测。检测样品为眼部及结膜分泌物，鼻液，唾液。

【产品组分】 1. 30份CDV Ag 试纸卡 2. 30份样品稀释液 3. 30份消毒棉签

4. 一份产品说明书【保存及有效期限】 室温保存，不可冷冻。生产日期起18个月有效。

【样品收集及准备】

- 1、用生理盐水沾湿的棉签收集狗眼部及结膜分泌物，鼻液，唾液；
- 2、采集样品时注意多部位同时收集新鲜及有效样品，充分在试管中搅拌稀释；；
- 3、静置5分钟，用一次性滴管取上清液；
- 4、样品一般须当即进行检测，否则应冷藏保存，超过24小时的，应该冷冻保存。

【检测步骤】

- 1、试纸条恢复室温；
- 2、取出试纸，开封后平放在桌面，从滴管中缓慢而准确地逐滴加入3-5滴混合液。
- 3、加样品液后，红色的液体从靠样品孔的观察窗边缘涌出，朝另一方向流动。
- 4、5-10分钟后判断结果。

【结果判定】 阳性（+）：当位置C显示出红色线条，而位置T同时显示出红色线条时，判为阳性。

阴性 (-)：当位置C显示出红色线条，而位置T不显色时，判为阴性。

无效：当位置C不显示出红色线条，则无论位置T显示出红色线条与否，该试剂盒判为无效。

- 【注意事项】**
1. 仅用作体外诊断。
 2. 注意样品具有潜在传染性，注意防止交叉感染。
 3. 该试纸及配套试管、棉签均为一次性产品，不可交叉及重复使用。
 4. 包装袋破损或产品过期请勿使用。