

# 禽流感病毒检测试纸条

产品名称	禽流感病毒检测试纸条
公司名称	苏州艾瑞德生物科技有限公司
价格	.00/条
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区东吴北路31号吴中科技创业园B幢201室
联系电话	0512-68796311 15850166981

## 产品详情

### 【原理】

采用双夹心免疫原理和胶体金层析技术制成快速检测流感病毒的试纸。在玻璃纤维纸上包被金标记单克隆抗体，在NC膜上检测线和对照线上分别包被单克隆抗体和羊抗鼠IgG。当检测样本为阳性时，形成抗体-抗原-金标抗体复合物而凝聚显色，游离金标抗体以及未捕捉的复合物在对照线处与羊抗鼠IgG结合而富集显色。阴性标本仅在对照线处显色。整个试验仅需5-10分钟。操作简便、快速、准确、灵敏度高、直观、结果容易判定。

### 【包装】

- 1、检测卡 30快
- 2、滴管 30根
- 3、缓冲液 30管
- 4、说明书 1份

**【操作方法】** 一、样品制备：1. 本检测卡采集样品为眼、气管分泌物、肛门分泌物。将棉签插入分泌物最多的部位，轻轻摇动棉签，让棉签充分吸收分泌物。  
2. 将棉签在稀释液中充分搅拌并反复挤压试管壁，让分泌物充分溶解到稀释液中，得到待检样品。  
3. 样品一般须当即进行检测，否则应冷藏保存，超过24小时的，应该冷冻保存。 二、操作步骤：1. 使用前将试剂盒和样品恢复至室温。 2. 将棉签浸入装有样品稀释液的试管，充分搅拌混匀后，用一次性滴管取上清液。 3. 取出检测卡，开封后平放于桌面上，从滴管中缓慢而准确地逐滴加入2-3滴混合液。 4. 加样品液后，约30秒内，红色的液体从靠样品孔的观察窗边缘涌出。朝另一方向流动。 5. 5分钟时判断结果，超过10分钟的结果无效 **【结果判断】**

- 1、阳 性：在对照区（C）和检测区（T）各出现一条颜色较深的紫红色线，样品中的抗体水平越高，检测区（T）线颜色越深。
- 2、弱阳性：在对照区（C）出现一条颜色较深的紫红色线，而在检测区（T）出现一条颜色很浅的紫红色线。
- 3、阴 性：在对照区（C）出现一条色线，在检测区（T）不出现色线。
- 4、无 效：在对照区（C）和检测区（T）都不出现色线。

#### 【注意事项】

- 1、本检测卡作为体外诊断试剂，，仅起辅助诊断作用，不能作为确诊依据。
- 2、取出检测卡后，应先恢复常温，撕开铝箔包装后应尽快进行实验，谨防潮湿。
- 3、一卡一样，尽量避免交叉。
- 4、取样后用试剂盒提供的稀释液溶解，请勿使用生理盐水稀释，避免影响检测效果。