

## KB-70儿童手动起立床 倾斜台

产品名称	KB-70儿童手动起立床 倾斜台
公司名称	北京康柏伟业商贸有限公司
价格	6800.00/个
规格参数	包装:木箱 品牌:北京康柏伟业 产品编号:K B -70
公司地址	北京市丰台区花乡 郑王坟万柳桥南97号3201室
联系电话	13552162447

## 产品详情

包装	木箱	品牌	北京康柏伟业
产品编号	K B -70	使用场合	其他
送礼对象	其他	是否提供加工定制	是

如需网上订购请先咨询，电话：13552162447！！

我公司是生产康复器材的专业生产厂家，从事生产加工康复器材，可生产销售上百种康复器材产品，价格低廉，质量一流，也可根据用户或经销公司的要求生产设计多种康复器材，欢迎广大用户或经销商来电咨询及合作。

电话：010-57195727、010-67588109

手机：13552162447刘经理

北京康柏伟业商贸有限公司

供应kb-70儿童手动起立床 倾斜台

规格：1600\*600\*500

配制：

- 1、倾斜台 1台
- 2、可调桌面板 1张

3、说明书 1套

4、保修卡 1张

适应症：脊髓损伤，脊柱裂、脊髓处脑瘫、小儿麻痹症、中风、脑外伤、格林巴利综合症等。

特点：

- 适用各年龄段和身材的病人。
- 提高呼吸循环系统功能，增强肺活量。
- 避免骨质疏松。
- 维持内脏器官的正常，促进腹腔器官的蠕动和排便、排尿控制能力。
- 强化多个关节的活动，改善肌肉萎缩和僵直，防止褥疮。

使用方法：

- 1.倾斜台置水平位，把脚轮锁好，将患者转移至倾斜台仰卧平卧。
- 2.先将足底板调节至所需位置（角度），使患者的足底与倾斜台的脚踏板接触平实后，系好保护带。保护带一根系在膝关节下10厘米处，一根系在膝关节上10厘米处，另一根系在腹部。保护带要系紧系牢，确保站立后患者膝关节不能产生弯曲。
- 3.手按上倾斜台即开始站立。在设备侧面有一个刻度盘指示站立角度。您可以根据需要停留在0度到90度的任意位置上。
- 4.根据情况可将可调桌板插到床两侧安装孔上，调节好需要的高度后锁紧手柄即可，另外，桌面板下方有球形手柄杆，提动手柄可调节桌面板的角度，调节到合适位置后锁紧固定。
- 5.站立训练完成后，倾斜台回到平躺位。到达平躺位后请及时松开摇把，以保护设备。
- 6.松开保护带，打开桌面开关，扶患者离开倾斜台，即完成一次站立训练。