

3M压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行式）

产品名称	3M压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行式）
公司名称	北京安杰龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市石景山区古城路6号
联系电话	010-68888276

产品详情

使用范围：用于压力蒸汽灭菌锅包内灭菌质量的化学监测，可用于121度或132度压力蒸汽灭菌锅

产品说明：该指示卡由纸芯和对蒸汽及温度敏感的位于纸/塑和纸/金属压片中的化学球组成，化学球溶解后变成黑色并沿纸芯移动，并可通过卡片上的ACCEPT（成功）和REJECT（失败）窗口观察到。该移动由蒸汽质量、时间和温度决定。

使用方法：1、预留出可再封口的余量，用剪刀在有剪刀标志的部位剪开口袋，拿出足够数量的指示卡，并将口袋至少折两次，再次封好口袋。2、将指示卡放入将要进行灭菌的包裹，袋子和敞开的盒子中央。指示卡应该放在硬质容器的角落或至少是两个对角，或放在最难灭菌的地方。3、按既定程序进行灭菌。4、灭菌结束后，黑色应进入卡上的ACCEPT（成功）窗口。如果没有进入这一窗口，而只进入了REJECT（失败），则表示被灭菌物品没有被暴露在有效的灭菌环境中，应该放到未灭菌的区域。5、如果几个被灭菌的物品均为REJECT（失败），应观察生物指示剂的结果，并分析失败的原因。

规格：500片/包