

# 生物指示剂培养器

产品名称	生物指示剂培养器
公司名称	北京安杰龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市石景山区古城路6号
联系电话	010-68888276

## 产品详情

### 适用范围

适用于压力蒸汽灭菌器生物指示剂灭菌效果的检测培养。

### 性能特点

WEP-A型生物指示剂培养器是ME-型压力蒸汽灭菌生物指示剂专用配套设备，具有以下特点： 1 新型自动控温加热系统，无明火，寿命长。 2 双层保温式结构，器内四周及中央温度均衡。 3 平均功耗10瓦，功耗低，节能省费。 4 培养器内温度为56℃，一次能容纳32支生物指示剂小管。 5 可透视观察指示剂的颜色变化，操作方便，安全可靠。 6 体积小，尺寸160mm × 120mm × 120mm，重量0.6公斤。

### 使用方法

1 打开培养器的透明顶盖，取出生物指示剂托架。 2 将生物指示剂管置于托架上，然后再放入培养器内，盖上透明盖。 3 将培养器的电源插头插入220V交流电源插座内，此时电源接通。 4 通电后，温度即开始上升，半小时可达到并保持在56℃的培养温度。 5 培养至规定时间，拔掉电源插头即可。如要连续使用，可一直通电使用，无须断电。