

减肥仪=冲击波爆脂仪/碎脂仪

产品名称	减肥仪=冲击波爆脂仪/碎脂仪
公司名称	广州姿源美保健美容仪器有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	广州市白云区联和鹤龙一路御丰广场2C10
联系电话	020-23378789

产品详情

简单描述 全球首台侵入式技术-----冲击波碎脂 一次冲击 脂肪立碎
新一轮席卷韩、日美体冲击波：名媛政要争相体验冲击波碎脂
冲击顽固性肥胖人群：直接击碎脂肪，不论遗传顽固与否
冲击体外市场：气波直接穿透脂肪腔体，带来绝对震撼的效果：

一、概述“肥胖”，对于大家来说，相信已经不是一个陌生的名词。当我们的生活逐渐步向小康的时候，您同时会发现周围环境中的胖子似乎也越来越多、越来越胖了，稍不留神连您自己也可能成为“胖人一族”中的成员。有人说，胖不胖，一眼就能看出来，确实如此。但诊断肥胖，肉眼的观察不能作为凭据，需要的是科学依据。二、什么是肥胖 通俗地说，肥胖就是体内脂肪积聚过多。医学界认为，如果一个人每天摄入食物中所含的能量大于机体的消耗量，多余的这部分能量就可能会以脂肪的形式储存在体内，久而久之，这个人的体重就可能超过正常的体重标准。当一个人的体重超过标准体重10%时，称为超重；超出标准体重的20%，称为轻度肥胖；超出标准体重的30%，称为中度肥胖；超出标准体重的50%以上，称为重度肥胖。三、工作原理 利用聚集冲击波头发射出频率达40000HZ的强烈声波，极速振动脂肪细胞，在脂肪细胞内外产生无数真空气穴，强力撞击脂肪细胞，令脂肪细胞膜产生内向爆破，使甘油三酯分解成甘油和游离脂肪酸，再由频率达0.5MHZ的射频波，深层透热治疗，给皮肤供应氧气及有机营养物质传送，加强细胞作用，提升血液及淋巴循环，活跃新陈代谢，消除及软化蜂窝状组织，达到减肥及控制肥胖目的。四、仪器功能与治疗原理 1、强力爆脂、去除脂肪 利用聚集了强烈声波的强声波头发射的频率达40000HZ的声波，进入人体后可使人体脂肪细胞产生一种强烈的撞击作用及脂肪细胞间的摩擦运动，能有效消耗热量，消耗细胞的水份，使脂肪细胞缩小，另外当声波震动时能使细胞间产生强裂撞击，细胞瞬间爆破，脂肪细胞减少，从而达到去除脂肪效果。2、溶解脂肪、淋巴排毒、紧致肌肤、增强皮肤弹性 以最先进的射频技术与能量射频于一身，可以深层直达脂肪体，具有靶向定位射频输出的卓越性，使脂肪细胞组织在快速活跃的状态下，产生细胞体的热能摩擦热，使局部温度升高，通过汗腺，肝肠循环及淋巴将体内的多余脂肪及毒素排出体外，达到嫩肤、提升、收紧等神奇功效。

五、技术优势 1、采用当今世界尖端的冲击爆脂技术。 2、适合所有皮肤。
3、护理过程中，舒适，无痛，无创伤。 4、操作简便，易学易用。 5、无消耗，成本低，回报快。
六、特点 1、不用开刀及麻醉即可完成流程。 2、不会造成凹凸不平的现象。
3、不会出血及出现肿瘀现象。 4、绝无副作用，效果显著，不会反弹。

- 5、无创无伤，不影响正常工作生活。七、脂肪爆破流程 1、冲击爆脂：透过强声波直击脂肪层，极速振动深层顽固脂肪，在脂肪细胞内外产生无数真空气穴，强力撞击脂肪细胞，令脂肪细胞产生内向爆破，分解成游离脂肪酸。2、射频溶脂：通过高效能的射频能量，再次促进脂肪分解，促进机体新陈代谢，将分解的游离脂肪酸，通过肝肠循环，淋巴管道排出体外。八、脂肪爆破流程 1、冲击爆脂：透过强声波直击脂肪层，极速振动深层顽固脂肪，在脂肪细胞内外产生无数真空气穴，强力撞击脂肪细胞，令脂肪细胞产生内向爆破，分解成游离脂肪酸。2、射频溶脂：通过高效能的射频能量，再次促进脂肪分解，促进机体新陈代谢，将分解的游离脂肪酸，通过肝肠循环，淋巴管道排出体外。九、注意事项
- 1、严重疾病，如心脏病、胃溃疡、严重胃病、十二指肠溃疡、高血压、糖尿病等。
 - 2、妇、哺乳期妇女，腹部手术不满三个月，经期禁做。
 - 3、食忌三高食品，以清淡为主。
 - 4、空腹使用仪器，饱餐后至少1小时后才能进行减肥疗程
- 十、产品的服务与维修 1、本仪器自购买日起（凭票据）主机保修一年，其它非保修范围或已过保修期的，亦可负责维修和更新，收回工本费。零配件及消耗品，如需补充或购买，请与经销商联系。
- 2、对以下使用者个人原因造成的故障，不提供免费保修服务：A、擅自拆装改装本产品造成的故障。B、使用不慎摔打跌落而造成的故障。C、因缺乏合理保养而造成的故障。D、没按使用说明的正确指导而造成的故障。
 - 3、本公司产品之设计规格如有变更之处恕不另行通知，若有疑问，请与公司联系。

用途：减肥，塑身

售后：按照国家电子证件订制实施，
三个月有任何质量问题，我们是保换新机的。一年保修，终身维护。。。

包装：泡沫 纸箱

配件清单：冲击波爆脂头 1个

射频溶脂头 1个

贴片 2对

点极腹包 1件

电源线 1条

说明书 1份

保修卡 1张