

飞利浦 Release 安装支架 M8001-60013 Rev 0450 M8003-60021 Rev 0451

产品名称	飞利浦 Release 安装支架 M8001-60013 Rev 0450 M8003-60021 Rev 0451
公司名称	新余多乐生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	渝水区城北仙来中大道211号成长大厦2105
联系电话	18879071075

产品详情

产品描述

飞利浦 Release 安装支架 M8001-60013 Rev 0450 M8003-60021 Rev 0451

飞利浦 IntelliVue MP20 MP30 MP40 MP50 患者监护仪快速释放安装底座支架
M8001-60013 Rev 0450 M8003-60021 Rev 0451

品牌：飞利浦

材质：塑料

颜色：灰色

特点：可靠、经济

产品名称：飞利浦

类型：M8003-60021

应用：ICU、医院设备

运输方式：快递

交流输入电压：100 V ~ 240 V

起订量：1 件

保修：6个月

发货时间：48小时内

语言：中文

优势：拥有多年经验的技术工程师

原创服务：在线技术支持

高光：飞利浦 Release 安装支架

送货政策：我们会在收到付款、投保和跟踪后立即安排快递公司运送货物。快速安全地交付您的设备对我们来说至关重要。费用将取决于您的位置、您希望多快收到包裹以及您订购的商品。如果您的订单花费的时间比预期的要长，或者您想知道它何时到达，请联系我们。

飞利浦 IntelliVue MP 系列快速释放下支架已修复并准备安装。
该支架已由我们训练有素的生物医学技术部门根据制造商的规格进行了测试、清洁和修复！

适用单位

飞利浦 IntelliVue MP20 M8001A 病人监护仪

飞利浦 IntelliVue MP30 M8002A 病人监护仪

飞利浦 IntelliVue MP40 M8003A 病人监护仪

飞利浦 IntelliVue MP50 M8004A 病人监护仪

安装程序

松开固定快速总成的两颗螺丝，取下快速总成。零件 飞利浦 intellivue mp20 mp30 mp40 mp50 快拆安装底座支架 m8040a 0 固定支架配有白色释放旋钮盖。
取下此盖并将其替换为固定安装套件的灰色盖。配件 飞利浦 intellivue mp20 mp30 mp40 mp50 快拆安装底座支架 m8040a 1 插入固定支架并用两个螺钉固定。配件 飞利浦 intellivue mp20 mp30 mp40 mp50 快拆安装底座支架 m8040a 2

按照测试和维护部分中的说明执行视觉和电源测试。

如果您对 Philips Release Mount Bracket M8001-60013 Rev 0450 M8003-60021 Rev 0451 感兴趣，请随时与我们联系。