

吸脂体雕仪(普通)资阳减肥仪器渝北美容院专用

产品名称	吸脂体雕仪(普通)资阳减肥仪器渝北美容院专用
公司名称	丹意达(中国·重庆)美容美体仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区大同路45号
联系电话	023-63717877 13638385299

产品详情

产品名称：DYT-M6B 吸脂体雕仪(普通) 产品类别：美体减肥仪器 产品用途：全身美体减肥塑型（快速消除脂肪，腰腹塑形，塑造臀形、腿形等）；消除橘皮样病变、瘦身消减脂肪团；排毒、紧肤、舒筋活血、缓解肌肉紧张、酸痛；全身抗衰老、增进机体代谢的速度，加速体内废物及湿气的排出；修复妊娠纹(一次见效，一次尺寸减2-12公分，体重下降0.5-5斤)。仪器原理：M6B吸脂体雕仪丹意达美容仪器公司利用高科技集所有国内外塑身减肥仪器的优点，该减肥仪器是最新的科技革命，能有效治疗顽固脂肪团及橙皮脂肪，其利用声波的空穴效应，作用于脂肪团，使其破裂、分解而被淋巴系统所吸收，排出体外。此减肥仪器能有效促进组织的新陈代谢、击退橙皮脂肪、收紧肌皮、增强肌肤弹性等，且效果持久。同时还可提升肌肉弹性及促进细胞新陈代谢。此减肥仪器利用靶向定位射频溶脂与射频能量塑型，结合强声波技术，气压吸啜捏脂技术。强声波能强力渗透到皮下组织3-5cm，通过震动把大块的脂肪分解成小块，使细胞重新排列，更加紧密，同时振脂过程中能使脂肪细胞摩擦生热自身分解；再通过光的渗透把小块脂肪溶解成流体，通过身体的六大排泄系统进行代谢；同时结合“塑型体雕套”，然后利用不同频率强度的微电流和感应电流组成全频生物波形，气压吸啜捏脂按摩，从而收紧松弛肌肤从根本上解决肥胖问题。还可以在同一时间内完成雕塑出完美理想的S曲线。吸脂体雕仪的爆脂射频熔脂头爆脂对减肥部位，以打圈方式操作15-20分钟（目的在于利用爆脂头，快速将脂肪爆破），爆脂射频熔脂头射频溶脂针对减肥部位，以打圈方式操作15分钟左右（目的利用射频头快速将脂肪溶解排除）。吸脂体雕仪的捏脂塑型头针对肥胖位置进行移脂减肥，当捏脂塑型头吸起脂肪后，向淋巴结处引流。操作时间为10-20分钟，（目的利用负压交叉感电流，促进毒素废物的脂肪的排除，刺激该处可引起有关肌肉收缩，可使肌肉强化，改善肌肉松弛及肥胖等现象。吸脂体雕仪射频熔脂头：21世纪最新无创爆脂瘦面瘦身的高端技术DYD。它是一种核磁波，以每秒100万次核磁振动频率可直达皮下深层组织1~6cm，可刺激到深处的脂肪细胞，使皮下深部温热，深层的毛细血管及淋巴组织都能流通顺畅，促使药物直至脂肪深层，使药物充分吸收、分解脂肪，同时核磁波进入人体后可使人体脂肪细胞产生一种强烈的撞击作用及脂肪细胞间的摩擦运动，能有效消耗热量，消耗细胞的水份，使脂肪细胞缩小，另外当核磁震动频率达到最高范围后，细胞间产生强裂撞击，细胞瞬间爆破，脂肪细胞减少，从而达到美体效果。热能射频也就是RF(RADIO FREQUENCY)是一种影响组织中分子内生物电，在该仪器的作用下，从而产生“生物电能”，所产生的高频射频能令体内快速产生热能刺激增生胶原细胞，修复老化受损的肌肤，从而达到除皱紧肤，迅速解决面部皱纹、收缩毛孔、瘦脸，去双下巴，提升颈部肌肤、改善橘皮、腹部手部减肥，腿型重塑等效果。同时所引发的生物能可快速增强局部血液循环、引起脂肪酸的分解和脂肪细胞的调亡，达到溶脂瘦身。吸脂体雕仪捏脂塑形头：塑形减肥是新技术，集多种功能于一身DYT，动感交叉感电流护理，使

活性成份导入皮下组织中，活化其脂肪分解过程，以及引流出表面组织中的滞留水份，也使该部份的血液与淋巴液的交换得到改善，不但改善了细胞的功能，而且也促进了毒素废物的排除，另它还能产生与天然运动极为类似的肌肉收缩，当电极很正确的触及「运动点」(MOTORPOINT)，以电流刺激该处可引起有关肌肉收缩，可使肌肉强化，改善肌肉松弛的现象。仪器特色：非手术；非侵入；不流血；无痛；无痕；无创；无须恢复期；治疗时间短；见效时间快；无需节食；

技术参数：

项目	参数
RF频率	2.5W
RF工作时间	连续
有负压强度	- 0.09Mpa
负压流量	140L/min
吸附频率	大小可调
红光波长	700-2000nm
红光功率	3W
工作频率	50-60Hz
电压	100V--240V
尺寸	50 × 45 × 165cm
包装	60 × 55 × 135cm
重量	32kg