

脉动负压纤体仪 资阳减肥仪器渝北美容院专用

产品名称	脉动负压纤体仪 资阳减肥仪器渝北美容院专用
公司名称	丹意达（中国·重庆）美容美体仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区大同路45号
联系电话	023-63717877 13638385299

产品详情

产品名称：DYT-802 脉动负压纤体仪 产品类别：美体减肥仪器 产品用途：美体减肥、瘦身、雕塑体形；消除橘皮样病变、消除身体组织代谢积滞现象、排毒；改善静脉血液循环，强化组织代谢功能，有效改善肤质；缓解肌肉紧张、酸痛；全身抗衰老(一次见效，无效退款) 仪器原理：脉动负压纤体仪是丹意达美容仪器公司最新研发和生产的一种美体减肥仪器，此仪器是集合40KHz强声波碎脂，5MHz射频溶脂及-0.09MPa真空负压吸脂为一体，有效针对各种问题性肥胖及因衰老引起的皮肤问题。

40KHz 强声波：由于脂肪组织密度低，细胞间黏合力较弱，强生波在脂肪细胞间产生空化效应，强大的冲击力会导致脂肪细胞的爆破，细胞间剧烈的相互做用，使脂肪细胞温度骤然上升，加速其溶解过程。

5MHz 射频：以最先进的射频技术，直达深层脂肪层，靶向定位输出射频能，使脂肪细胞组织在快速活跃的状态下，产生细胞体的热能，使局部温度升高，通过汗腺及淋巴将体内的多余脂肪及毒素排出体外，以达到溶解脂肪的功效。同时射频能刺激深层胶原蛋白再生，重组，使肌肤恢复紧致细腻。

-0.09MPa 负压：利用真空负压吸力，对身体各组织进行提、按、拉等仿生按摩，促进血液及淋巴循环，通经活络，排毒养颜。

注意事项：1、在使用此仪器前，请务必仔细阅读以下内容：
2、儿童，孕妇，以及皮肤病、静脉曲张、癌症、艾滋病、血液性疾病、精神类疾病等患者禁止使用
3、此仪器禁止使用在身体淤青、创口以及痣，眼睛，口腔，喉部，耳朵，乳头，性器官等部位
4、长期服用抗生素、抗凝剂、抗组胺等药物，接受整形、抽脂手术后以及心脏病患者请在医师的指导下使用此仪器
5、使用此仪器时请按照操作说明设定不同程序并使用相应手法在治疗部位移动，切不可在某个部位停留时间过久。
6、请遵医嘱定期使用此仪器。治疗效果会因年龄、体质、生活方式不同有所差别。
7、请勿拆解此仪器，或试图进行说明书中未加以说明的操作。所有的维修工作必须由本公司指定或认可的专业维修人员进行。
8、请在使用后拨开电源线，以免发生危险。
9、请勿将任何类型的物体或液体插入或渐入仪器。如有上述情况发生，请立即切断电源并与我公司联系。
10、为延长机器的使用寿命，开关机间隔请在一分钟以上。
11、使用电源应和本机标注的电源规格相符，否则可能使仪器不正常工作甚至烧毁。

项目	参数
RF频率输出	100W
RF射频工作	连续

有负压强度	- 0.09Mpa
负压流量	140L/min
吸附频率	~ 级可调
红光波长	700-2000nm
红光功率	10W
工作频率	50-60Hz
电压	100V--240V
尺寸	70 × 59 × 140cm
包装	73 × 62 × 96cm
重量	25kg