

聚焦能量美体仪成都桥减肥丰胸仪器丹意达渝中

产品名称	聚焦能量美体仪成都桥减肥丰胸仪器丹意达渝中
公司名称	丹意达（中国·重庆）美容美体仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区大同路45号
联系电话	023-63717877 13638385299

产品详情

产品名称：DYT-902 聚焦能量美体仪 产品类别：美体减肥仪器 产品用途：

美体减肥、美体瘦身、雕塑体形； 消除橘皮样病变、瘦身消减脂肪团； 排毒、紧肤、舒筋活血、缓解肌肉紧张、酸痛； 全身抗衰老； 对修复妊娠纹有很好的疗效。仪器原理：聚焦能量美体仪是丹意达美容仪器厂最新研制与开发的一款融合了50K聚焦强声波，RF双极、三极射频，真空吸附和BIO+冷光4大核心技术为一体的高科技纤体美容仪器，此仪器不但技术超前，而且效果显著，一次见效，外观精美，深受美容院机大型整形医院的赞扬与好评，并得到了院长的热烈推荐。

建议护理步骤: 1、治疗前，先把产品涂抹到皮肤上，如腹部、臀部、大腿、面部。

先把电源线及配件插到相对应接头上，打开电源开关。仪器进入待机状态。 2、第一步：点击“BODY”进入身体雕塑系统，操作50K强声波爆脂头(用于身体)，设定好工作时间（约10到15分钟），选择好所需的强度及模式，强度以客户承受力度为准，模式以客户舒适度为宜。点击“START”键进入工作状态。

操作完后。把强度归零。即可进入下一步操作。 3、第二步：操作真空光纤吸脂头(作用于身体)，设定好工作时间（大约10到15分钟），选择好所需的强度及模式，强度以客户承受力度为准，模式以客户舒适度为宜。点击“START”键进入工作状态。操作完毕后。把强度归零。即可进入下一步操作。

4、第三步：操作三极射频头(作用于身体)，设定好工作时间（大约10到15分钟），选择好所需的强度，强度以客户承受力度为准。点击“START”键进入工作状态。操作完毕后。把强度归零。点击“BACK“返回首页，即可进入下一步操作。

5、第四步：点击“FACE”进入面部雕塑系统，操作BIO+冷光头（作用于眼部）设定好工作时间（大约5到8分钟），选择好所需的强度及模式，强度以客户承受力度为准，模式以客户舒适度为宜。点击“START”键进入工作状态。操作完毕后。把强度归零。即可进入下一步操作。

6、第五步：操作双极射频头（作用于面部）设定好工作时间（大约5到8分钟），选择好所需的强度，强度以客户承受力度为准。点击“START”键进入工作状态。操作完毕后。把强度归零。操作完毕。

仪器配件：真空光纤吸脂头 50K强声波爆脂头 三极射频头 双极射频头 BIO+冷光头 技术参数：

项目	参数
RF频率	2.5W
RF工作时间	连续
有负压强度	- 0.09Mpa
负压流量	140L/min

吸附频率	~ 级可调
红光波长	700-2000nm
红光功率	10W
工作频率	50-60Hz
电压	100V--240V
尺寸	50 × 38 × 142cm
包装	65 × 55 × 112cm
重量	25kg