

# 油性理疗仪导电膏美容导入啫喱按摩膏按摩油

产品名称	油性理疗仪导电膏美容导入啫喱按摩膏按摩油
公司名称	济宁高新区金诺特医用凝胶厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国山东济宁市吴泰闸路134号
联系电话	86 0537 2685735 15653701980

## 产品详情

按摩导电胶 按摩导入胶

理疗仪导电膏 按摩仪导电膏

理疗仪导电胶 美容仪导电胶

理疗仪导电液 理疗仪导电凝胶

理疗仪导电啫喱 电生理仪导电胶

使用说明书

本公司引进澳大利亚专利技术，采用美国进口原料，历时2年开发了用途广泛的理疗仪导电膏、美容导入胶、按摩膏。其产品质量可与美国进口的导电膏、导入胶相媲美，而价格相当优惠，是国内消费者的福音。

产品名称：

理疗仪导电膏 美容导入胶

英文：Conducting Gel

使用范围：

适用于各种进口或国产理疗仪及保健仪、电生理仪、微电流刺激仪、超声美容仪、止鼾器、DDS按摩仪等的仪器，涂敷于皮肤与电极（或探头）接触面之间，用作导电或传导超声或导入的介质。

产品效用：

导电 导声 导入 保湿 润滑

使用方法：

在（理疗仪、保健仪、电生理仪、超声导入仪）的操作中，涂敷于电极（或探头）表面，使导电膏完全湿透电极片为止。注意事项：

- 1、本产品仅供外用，请勿内服。
- 2、请置于儿童不宜取到之处。
- 3、皮肤面有溃疡等感染患者忌用。
- 4、严禁喷入眼睛中。如若不测，及时用清水冲洗即可。

产品特点：

- 1、采用先进的导电导声导入技术，效果稳定、持久。
- 2、有效降低皮肤与电极间电阻抗、声阻抗，保证各类理疗仪、按摩仪、电生理仪、美容导入仪等的效果。
- 3、单支小管设计，预防交叉感染，对皮肤无刺激，无过敏、无油腻感，不需要再次冲洗。
- 4、对电极或探头无腐蚀，延长电极使用寿命。

规格：

100克/支；250克/瓶。

储藏：

密封，置阴凉处保存。保质期：24个月

专业生产：济宁高新区金诺特医用凝胶厂