

洗鼻器使用安全事项

为了减少伤害，儿童使用电器产品时，应予以密切的观察；

切勿用湿手拔出充电线；

切勿在洗澡时使用；

请及时联络本公司或授权的服务中心；

当本产品的充电线损坏，产品不正常运作、被摔坏或落入任何液体中，切勿使用本产品，

切勿将本产品放置或存储在可能跌落或拉扯到浴缸、淋浴间的地方；

无论是初次使用本产品，还是在本产品的使用期间，应始终注意检查

本产品的充电线是否损坏；

切勿将异物插入喷嘴孔或电源插孔；

切勿在使用氧气或气雾喷剂的范围内使用；

使用时切勿佩戴任何鼻饰，如果佩戴鼻饰，请在使用前除下；

切勿将产品放在靠近热气，电炉或发热的烤箱以免烫坏产品；

切勿使用任何别的或类似的产品洗鼻嘴，用以洗鼻；

本产品设计用于清洁您的鼻腔，请勿将本产品用作其他用途，请勿将水直接注入眼睛、耳朵或其他敏感部位，不当的使用会造成意外的伤害；

本产品是可充电电池设备，请选用合格的电源适配器或DC5V 1A USB接口，初次使用前请充满电，充电过程中不可使用本产品；

电源适配器作为选配件，应符合GB 9706.1-2007标准要求,其安全使用和相关事项应遵照相应的使用说明;

洗鼻器使用场所不应有高频医用设备或其他高频射频设备使用，避免电磁干扰；

应在清洁、通风、隔热、防潮、防尘、无有毒气体和腐蚀性物品的环境中；

本产品内置锂电池，使用环境温度不宜太高或太低，应在5 -40 环境中使用；

在产品使用到寿命末期，可能会出现出水量减小的状况，但不影响安全性能，一旦产品过了使用寿命期限，建议用户不要再继续使用该产品，可联系销售商或本公司继续购买新的；