

新优怡-高级强力吸奶器-婴儿用品1048

产品名称	新优怡-高级强力吸奶器-婴儿用品1048
公司名称	陈莉丽
价格	20.00/个
规格参数	品牌:新优怡 材质:奶瓶材质：英国进口PC 容量:150（ml）
公司地址	中国 湖北 宜昌市 湖北省宜昌市二马路41号
联系电话	86 0717 6745817 13647175118

产品详情

品牌	新优怡	材质	奶瓶材质：英国进口PC
容量	150（ml）	规格	yf-998
产品类别	吸奶器		

吸奶器的材质：

聚碳酸酯（pc）、聚丙烯（pp）、硅胶、橡胶。

特点：

吸奶罩采用进口食品级高强材料聚碳酸酯（pp）制成，无毒无味，配上新优怡奶瓶使用，可方便，可方便母乳喂养，特点适合职业女性使用。

配两端有止回阀的吸球，吸力强，省时省力，可连续操作，效率高。同时可视需要通过挤压吸球的力量大小及次数来调整负压。

人性化设计，在喇叭口加柔软硅胶垫圈，吸乳时倍感舒适。

配置150ml奶瓶、密封瓶盖、奶嘴等，专供母乳收集、贮存、喂养使用。可以同时适合市面上大多数标准口径奶瓶使用。

硅胶罩环内花瓣型设计能在吸奶时产生按摩效果，并同时能增强对乳房的吸附力以帮助吸奶的过程更为流畅。

使用方法：

使用前请将吸球及连接接管以外的部件清洗干净，并放入水中煮沸1-2分钟，晾干备。将奶瓶瓶身旋入吸奶罩，再将软管和吸球连接至吸奶罩尾部突出外。用干净纱布及温开水擦拭乳头，防止乳腺堵塞。将吸奶罩罩于乳房上并稍向下倾斜，贴紧。一手握住奶瓶，一手挤压橡胶球，即可吸出乳汁。

使用过程中可根据需要通过挤压吸球的次数来调整负压。吸奶结束负压过大时用手轻压乳罩与乳房接触外，使空气进入，即可取下乳罩。

吸出乳汁后，旋下奶瓶，装上奶嘴，即可喂养宝宝，亦可将吸出的乳汁用奶瓶装好放入冰箱，待方便时再再行喂养，职业女性特别适用。

温馨提示：

煮沸消毒时水量应盖过瓶身，避免产品因长时间接触到温度较高的锅底或锅沿面导致变形。

使用过程中如发现产品有破裂现象，请即弃用，另购新品。

每次最好将乳汁全部吸出，这样可促进乳汁的分泌，同时还可以防止乳腺疾病的产生。

如不慎将乳汁吸入软管和吸球，可用温水将软管和吸球清洗干净并晾干。吸入软管或吸球的乳汁不要用来喂养宝宝。

技术参数：

最大行程： $70 \pm 1\text{mm}$

吸奶轻度：真空度为 -0.025mpa

吸奶口规格： $\text{C } 80/\text{mm}$

手抽颜色：红/黄/蓝