

冰帽冰毯机-医用降温毯（双通道）

产品名称	冰帽冰毯机-医用降温毯（双通道）
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:河南煜博 产地:河南郑州
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

冰帽冰毯机-医用降温毯（双通道）

医用控温仪性能特点

全电脑控制，操作简单。方便。
温度控制，可靠，性能稳定、灵敏度高，可长时间连续运行，液晶彩色大屏幕显示，中文菜单采用进口压缩机、进口快插接头、低噪音水泵。自动控温，自动计时，降温速度快。进口传感器自动测温，可随时反应患者体温。具有缺水报警功能。仪器具有自检功能，病例查询功能。
降温毯、帽采用TPU材质，防腐蚀，具有耐低温及耐臭氧性能，使用寿命长，更持久、易清洗消毒

1、单纯降温法适用于高热及其他降温效果不佳的患者；

2、亚低温治疗适用于重型颅脑损伤；注意事项：

1、使用前检查水箱是否漏水，水箱内水量适宜，水箱内水应现用现加，检查冰毯是否漏水。正确连接电源、导水管及传感器，导水管外用不导电的塑胶裹，以保护安全。

2、使用时冰毯铺于患者肩部到臀部，不要触及颈部，以免因副交感神经兴奋而引起心跳过缓。毯上不铺任何隔热用物，以免影响效果，可用单层吸水性单，及时吸除因温差存在产生的水分，床单一旦浸湿，要及时更换，以免引起患者的不适。及时擦干冰毯周围凝聚的水珠，以免影响机器的正常运转，发生。

3、同时使用冰帽时，双耳及后颈部应垫上干毛巾或棉布，以免发生冻伤。清醒患者足部置热水袋，减轻脑组织充血，促进散热，增加舒适感。使用冰毯应密切监测患者体温、心率、呼吸、血压变化，每半小时测量一次。定时翻身擦背，以每小时翻身1次为宜，避免低温下皮肤受压，血流循环速度减慢环不良，产生压疮。

- 4、密切观察患者情况，如发生寒战、面色苍白和呼吸脉搏血压变化时应立即停止使用，如皮肤青紫等，表示静脉血淤积，血运不良，应停止使用。病人战时可加用冬眠药物，防止肌肉收缩影响降温效果，清醒病人不宜将温度调的过低。使用后要及时放出水箱内的水，以免形成水垢或变质，影响机器性
- 5、每1/2小时检查所测肛温，按照体温下降的速度及效果机体反应，调节毯温。
- 6、皮肤的观察护理：冰毯控温时，背部尤其骶尾部皮肤因用冰毯而发红，当皮肤发生青紫时，显示局部血液循环受阻，应暂停机。由于温差大，大量冷生，引起床单衣物潮湿时应及时更换，每1小时检查局部皮肤并翻身，翻身时枕头应置于冰毯下，以免减少控温毯接触皮肤面积而影响控温效果。极度消瘦制动患者极易发生压疮，应及时处理。
- 7、使用期间维护机器正常运转，体温波动明显时，应检查肛温探头位置是否正常。当降温效果不良时，应检查管道是否松脱，水槽水量是否足够。
- 8、当病人不需持续降温时，应及时撤去冰毯，防止病人皮肤受损。