

一次性间接喉镜

产品名称	一次性间接喉镜
公司名称	北京来时路医用材料有限责任公司
价格	3.00/支
规格参数	
公司地址	中国 北京 大兴芦城工业园1号
联系电话	010-61231838 13391950718

产品详情

一次性喉镜(间接喉镜) 产品注册号：京食药监械（准）字2014第1200551号

一次性间接喉镜是来时路公司生产的一次性耳鼻喉科系列产品之一，用于喉部检查。

来时路公司还生产一次性阴道扩张器(扩阴器、窥阴器、窥器)，一次性妇科检查包，一次性妇科拭子，一次性肛门镜(直肠窥器)，一次性耳鼻喉科检查包、一次性鼻镜，一次性间接鼻咽镜、一次性耳镜，一次性卷棉子，一次性枪状镊子，一次性膝状镊子，一次性口镜，一次性牙托，一次性换药盒、一次性注射冲洗器，医用洗鼻器，保健型洗鼻壶(瑜伽爱好者用)瑜伽洗鼻壶，洗鼻壶套装，洗鼻剂。来时路公司<http://www.laishilu.com> 诚邀您携手合作。

产品型号：a

产品规格：中小

主要技术指标：按 yzb/--0171--2005 设计生产。

包装说明：单个包装 1000支/箱

一．产品简介：

北京来时路医用材料有限责任公司制造的一次性使用间接喉镜是由医用高分子材料聚苯乙烯制成，由镜片和手柄组成。产品美观小巧，操作简单方便。

二．适用范围：

本产品适用于对患者的喉部检查，仅限一次性使用。

三．性能指标：

- 1、喉镜表面应光滑，周边圆弧应光滑无锋棱、无毛刺。
- 2、喉镜应有一定的韧性，在使用当中不应折断。
- 3、喉镜的镜片在使用当中不得脱落。
- 4、喉镜的镜片应清洁无污渍。

四. 使用说明：

1. 待患者口完全张开，左手持喉镜，使喉镜呈直角倾向喉头，柄偏右，顺右侧舌缘插入。
2. 镜片抵咽喉部后，使右偏镜柄转至正中位，并轻轻将喉镜向左靠，使舌偏左，扩大镜片下视野，此时可见到悬壅垂（此为暴露声门的第一标志）。
3. 顺舌背将喉镜片稍作深入至舌根，稍稍上提喉镜，即可看到会厌的边缘（此为暴露声门的第二标志）。
4. 检查完毕后，将喉镜轻轻取出。
5. 本产品采用钴-60消毒，只限一次使用。

五. 注意事项：

1. 本产品只限一次性使用，用后销毁。
2. 产品无菌，包装破损，禁止使用。
3. 本产品采用钴-60核辐射灭菌，自灭菌之日起有效期2年。
4. 生产日期见小包装封口处；灭菌日期见外包装“灭菌合格证”。

六．贮存方法：

本产品应储存在相对湿度不超过80%、阴凉、清洁、干燥、无腐蚀性气体和通风良好的室内，储存周期为2年。