

# 医用双通道降温毯-升温毯 医用控温仪

产品名称	医用双通道降温毯-升温毯 医用控温仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 型号:HW-2600 规格:双通道
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

医用降温毯特点：

- 1、推出大制冷功率超小型化机型，可随救护车实施医院外低体温治疗，并实现患者连续降温下的医院内外转运，提高患者生存率和改善预后
- 2、制冷功率居全身降温产品前列，体积仅为一半。
- 3、占地面积与电脑主机接近，高度与病床相当，方便治疗与护理操作。
- 4、全钢喷塑外型，国家保护的流线型圆滑外观设计，耐受严酷环境考验

技术参数：

- 1、简约友好的显示和操作界面
- 2、水温、体温显示与操作单元，并行排列
- 3、设定温度与实测温度，以不同颜色实时显示
- 4、报警信息同屏显示，所有参数一目了然
- 5、单键操作，简单明了
- 6、参数记忆功能，保证使用相同参数时，通电即用，利于争分夺秒救治患者
- 7、硬件平台

8、安全性能及精度符合医用标准

9、精简设计，量身度作

10、高稳定性，易于维护

使用操作规范

操作前准备

1. 环境准备 房间气流通畅；配有电源、稳压器和可靠地线；背侧通风孔与物体间距须大于20cm。

2. 用品准备亚低温治疗仪、电源线、地线、温度传感器、管路、床单、蒸馏水、冬眠合剂、肌松剂、气管切开用物等。

3. 患者准备

使用前须向患者或家属解释。

评估病情。

使用冬眠合剂：实施亚低温治疗前，用氯丙嗪100mg，异丙嗪100mg及100mg，加0.9%N.S稀释到50ml。使用微量注射泵，静脉注入，待患者逐渐进入冬眠状态后，方可进行亚低温治疗。

单纯头部物理降温，可不使用冬眠合剂。

4. 仪器准备 连接好管道、毯子、传感器。