

医用降温毯 安全高效 电脑控制

产品名称	医用降温毯 安全高效 电脑控制
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 型号:HW-2600 规格:双通道
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

医用控温仪性能特点

全电脑控制，操作简单。方便。

温度控制可靠，性能稳定、灵敏度高，可长时间连续运行，液晶彩色大屏幕显示，中文菜单

采用进口压缩机、进口快插接头、低噪音水泵。

自动控温，自动计时，降温速度快。

进口传感器自动测温，可随时反应患者体温。

具有缺水报警功能。

仪器具有自检功能，病例查询功能。降温毯、帽采用TPU材质，防腐蚀，具有耐低温及耐臭氧性能，使用寿命长，更持久、易清洗消毒

医用降温毯注意事项：

降温毯预期只在病房使用，毯子与患者之间应有床单或衣服隔离，不直接与患者皮肤接触。禁忌症：已处于全身衰退期；合并有低血压、休克尚未纠正者；凝血功能障碍者、年老且伴有严重心肺功能不全者。机器运行中不得拔插连接管，并确保闲置的水路口端盖关闭可靠。主机背面通风孔与物体间距必须大于20cm，以利于散热。毯子、连接管不得打折，确保毯子内水循环畅通，注意观察毯子的温度，当温度异常时，提示可能出现毯子打折现象，必须立即将毯子重新铺平。毯子不得与患者皮肤直接接触，并应避免接触锐利物体。设备运行中应有专人看管。建议水温设定在15 -20，当水温低于13 时，患者会出现寒战，影响降温效果。机器停止使用时，断开设备与电源连接，将连接管从机器上取下，将毯子中

的水排空后，平铺或卷曲存放。体温传感器不可单独作为体温检测装置使用，应根据患者病情，确定测量患者体温的时间间隔。应采取必要措施防止冷凝水或因毯子破损漏出的循环水弄湿敷料，污染伤口。补充、更换蒸馏水应在停机状态下进行。使用水路快速插接装置，要确认快速插座的金属锁扣按压到位并锁住，此时金属片的圆孔与插座的圆孔重合，再将其与快速插头连接，出现“咔哒”声为到位。当设备被污染后，请采取必要的消毒措施，避免产生交叉感染。设备应每三个月更换一次循环水（蒸馏水、纯净水、灭菌注射用水）。