

# 医院亚低温治疗专用降温毯降温帽

产品名称	医院亚低温治疗专用降温毯降温帽
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:河南煜博 产地:河南郑州
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

医院亚低温治疗专用降温毯降温帽 冰毯冰帽临床应用及特点：广泛应用于脑炎、脑水肿、脑出血、脑外伤、颅高压心肺复苏及高热惊厥、中枢性高热患者，进行物理降温。特别是对颅脑损伤及术前、术后亚低温治疗、以及脑内出血、喉部患者、扁桃体发炎及术后的康复和对顽固性高烧,禁忌使用药物的患者进行亚低温治疗，有效提高患者生存率。

医院亚低温治疗专用降温毯降温帽 患者在使用冰毯的过程中需注意事项：（1）病室保持清洁、干燥、通风良好温湿度要适中：温度在10-30摄氏度为宜湿度应小于80%。（2）机器放置平稳搬运时尽量避免震动。背侧通风孔与物体间距必须大于20cm。（3）使用前检查水箱是否漏水水箱内水量适宜水箱内水应现用现加检查冰毯是否漏水。正确连接电源、导水管及传感器导水管外用不导电的塑胶管包裹以保护安全。传感器线应避免暴力拉拽探头避免摔落。（4）使用冰毯前先评估患者皮肤情况：如有无压疮、组织有无损伤、末梢循环情况是否良好。询问患者是否属于冷过敏体质等。（5）使用时冰毯铺于患者肩部到臀部不要触及颈部以免因副交感神经兴奋而引起心跳过缓。毯上不铺任何隔热用物以免影响效果可用单层吸水性强的床单。应及时吸除因温差存在产生的水分床单一旦浸湿要及时更换以免引起患者的不适。及时擦干冰毯周围凝聚的水珠以免影响机器的正常运转防止漏电发生。毯子应避免接触锐利的物体。（6）使用冰毯降温过程中应密切监测患者体温、心率、呼吸、血压变化每半小时至一小时测量一次。定时翻身擦背以每小时翻身1次为宜避免低温下皮肤受压血流循环速度减慢局部循环不良产生压疮。（7）冰毯密切观察患者病情如发生寒战、面色苍白或呼吸、脉搏、血压有变化时应立即停止使用如皮肤青紫等表示静脉血运不良应停止使用。病人出现寒战时可遵医嘱加用药物防止肌肉收缩影响降温效果清醒病人不宜将温度调的过低。（8）冰毯停用后要及时放出水箱内的水以免形成水垢或变质影响机器性能。