

# 批发供应上海鱼跃台式水银血压计

产品名称	批发供应上海鱼跃台式水银血压计
公司名称	吴锦斌
价格	65.00/个
规格参数	产品类别：:家用血压计 品牌：:鱼跃 型号：:半自动
公司地址	中国 广东 普宁市 广东省普宁市池尾新寮新春路13幢4-6间
联系电话	86 0663 2935646 15917222300

## 产品详情

产品类别：	家用血压计	品牌：	鱼跃	型号：	半自动
动力模式：	手动	自动关闭功能：	无	箱装数量：	10
产地：	江苏	测量范围：	0-300mmHg ( m	显示方式：	水银柱显示

mHg)

### 乳胶球袋

#### 水银柱血压计使用方法

测量血压时应尽量保持安静，心情放松。紧张、焦虑、疲劳、失眠、剧烈活动等均影响准确测量血压。使用水银柱血压计的方法是：

(1、) 安静休息5分钟，取坐位，一般暴露右上臂，手掌向上放平，肘部和心脏大致在同一水平。(2、) 将血压计袖带紧贴在上臂，袖带下缘在肘窝上大约2厘米，将听诊器的听诊部件放在肘窝动脉搏动的地方。(3、) 血压计快速充气，当桡动脉(即通常中医医生号脉处)搏动消失后，再加压30毫米汞柱左右，随后缓慢放气(每秒2至6毫米汞柱)。(4、) 在放气过程中仔细听取声音的变化并观察水银柱的读数，当听到第一声有规律的搏动声音时血压计的读数，即为收缩压；继续缓慢放气，当搏动声音消失时的读数，为舒张压。如需重复测量时，血压计读数应保持在0位，相隔2分钟后，再重新充气测量，取两次读数的平均值作为血压值。

### 品质铸就品牌--鱼跃医疗.

鱼跃医疗设备有限公司是专业的医疗设备 & 护理器材研发、制造和销售的股份制企业，创始于1984年。公司对产品质量孜孜以求，各主要产品相继通过了美国食品与药品监督管理局“fda认证”、欧盟“ce认证”以及日本国“sg安全认证”。并被评为“江苏省名牌产品”。公司拥有优越的生产、办公环境以及现代化的制造设备和生产流水线。具备从金属加工、金属表面处理到技术装配的综合制造能力。公司已发展成为全国最大的医疗设备生产基地之一。

将袖带绑在左或右上臂（左右臂血压会有一些差别，始终在一侧测量就可以），在肘部横纹上1~2公分，松紧适度，打开血压计开关，调整好听诊器的耳塞，将听诊头放在袖带下，是肱动脉的部位，戴上听诊器，拧紧血压计气囊的阀门开始打气，平视水银柱，一开始会听到“怦”“怦”的类似心跳声，随着水银柱上升，声音逐渐减小到消失，这时可以停止打气（一般老百姓可能不好掌握这种尺度，还有一个简便方法就是了解被测人平时血压值，比如高压130，那么打气时超过这个20,到150停止就行）。慢慢松开阀门，一定要慢慢放气，注视水银柱并听声音，当开始出现“怦”“怦”声时，同时，水银柱有一些跳动，此时对应的值就是高压，这时水银柱继续下降，当“怦”“怦”声变小，此时对应的值就是低压。测完将袖带内的气挤出，血压计向右侧倾斜15度关闭开关。