

一款医用儿科特殊物理降温仪-退烧仪

产品名称	一款医用儿科特殊物理降温仪-退烧仪
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:煜博 产地:河南郑州 核心技术:航天级半导体控温
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

儿科冷敷机

“小孩发烧之后首先要根据孩子体温的情况给予一定的降温措施，如果孩子的体温超过38.5℃，可以给孩子口服退热药物，目前儿童比较常用的是对乙酰氨基酚和布洛芬。对于两个月以上发烧的孩子，可以根据孩子的体重然后来选择适当的药物进行降温。如果孩子体温没有达到38.5℃，这时候主要采用物理降温的方法，主要是温水擦浴以及让孩子多喝水，这样都能够帮助孩子降体温。同时要注意寻找一下引起孩子发烧的原因，比较常见的还是感染性疾病，包括呼吸道感染、消化道感染等。

冷敷机可使局部细管收缩，减轻局部血管充血，有止血、解痉、皮肤散热、降低体温等作用。一般适用于高热患儿和局部炎症疼痛及组织内出血者。对于大片组织受伤、局部血循环不好、皮肤青紫、一切慢性炎症和化脓变患儿则应禁用此法。

常规冷敷的方法有两种：

一、冰袋冷敷法。准备好冰袋，也可用热水袋或厚塑料袋代替。将冰块砸碎后放入盆内，用冷水溶去冰块的锐角，以免损坏冰袋。将加工好的碎冰块装入冰袋内，约占冰袋容积的1/2，灌入少量冷水，充填冰块间隙，排尽袋内空气后将盖拧紧，擦干袋外水迹，检查确无漏水后，用毛巾包裹冰袋，放在需要冷敷的部位。

用于高烧患儿降温，可将冰袋置于头部、颈部、腋窝沟、腘窝内侧等；用于治疗软组织挫伤，只需将冰袋置于挫伤部位。注意袋内装冰不可太多，以免压迫局部。放置后要注意观察体温变化，每20-30分钟测量体温1次，根据体温变化情况决定增减冰袋数目。一般每30-45分钟将冰袋移开5分钟，以改善局部血液循环。多个冰袋冷敷时，可交替移开。要随时观察局部皮肤颜色，并询问有无异常感觉，如有变色或麻木感时，应立即停用，以防局部注意冰袋不宜置于胸部、腹部、枕后。冰块融化要及时补充，以保持效果。

二、湿冷敷法。先盛半盆冰水或刚打上来的井水，再浸入两条毛巾，取出其中一条毛巾拧至半干，以不滴水为宜，然后敷于局部，每隔3-5分钟毛巾就变温了，再换一条冷毛巾，两条毛巾交替使用，一般持续冷敷15-20分钟；如病情需要，也可再延长5-10分钟。冷敷后擦干局部。用于降温时，除头部冷敷外，还可在腋窝、肘窝、腘窝及沟同时应用

医学临床常用冷敷方法：

使用的冷敷机搭配儿童降温小水囊，通过绑带固定在额头上，设备水循环过程中带走热度，达到降温效果。

收费项目名称及编码：

121100001

特殊物理降温