

# 医用笔试喷砂机|实验科研专用喷砂机|小型喷砂机

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 医用笔试喷砂机 实验科研专用喷砂机 小型喷砂机   |
| 公司名称 | 宁波市鑫哲机械厂                  |
| 价格   | 1980.00/台                 |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 宁波市鄞州区五乡镇逸夫中学东300米        |
| 联系电话 | 0574-88486691 15967870550 |

## 产品详情

医用笔试喷砂机|实验科研专用喷砂机|小型喷砂机

宁波鑫哲机械厂专业生产各种医用笔试喷砂机|实验科研专用喷砂机|小型喷砂机，此种喷砂机位出口机型，在医用笔试喷砂机|实验科研专用喷砂机|小型喷砂机属于领先机型。欢迎各位新老客户来店选购。

宁波市鑫哲机械厂公司网站<http://www.nbxinzhe.com>

联系电话：15967870550,0574-55111135

### 一、用途及特点：

本设备主要用于口腔技工对铸造金属冠（钢牙）铸造后的表面喷砂处理。

本设备有单罐与双罐二种。双罐喷砂机体内装有气源转换开关，扳动开关位置可改变左右喷砂笔（嘴）的喷砂功能（单罐不设置气源转换开关）。

照明光源采用稀土三基色电子节能灯，具有自然光、光亮高功能，属护眼系列。

### 三、主要参数：

电 源：220V 50HZ 使用气压：0.4-0.6Mpa

照明灯功率：8W 使用砂粒度：180#-250#（白钢玉）

光 色： 进气管径： 6

#### 四、使用和保养

- 1、使用前先检查罐内砂的储量，不得高于容积的2/3。砂的名称是白钢玉，特征为白色，粒度为180#~250#，而且要干燥、清洁，受潮后的砂不能使用，不然会产生堵塞，影响喷砂效果。
- 2、将电源插头插入220V的插座中，进气管接上气源（或气泵）。
- 3、使用时将气源放入，工作压力大约为0.4Mpa左右（用气压调节好压力），打开电源开关，照明灯亮后。手戴橡胶手套，一手握喷砂笔，另一手握钢牙。然后，脚踩气脚开关，就会进行喷砂工作。
- 4、工作期间严禁打开上盖（透明盖）防止砂向外飞溅。

#### 五、注意事项

- 1、不适宜在爆炸危险性的地方或化学防腐剂处理有趋势性的气体环境中使用。
- 2、砂的粒度的规格和型号要相符，不得沾有异物和受潮，否则会影响效果。
- 3、喷砂工作完后，异物应及时清理。
- 4、加砂是存储罐盖应清理干净后拧紧，防止气体外泻。

#### 六、质量承诺

- 1、产品自购买之日起在中国境内负责保用一年，在保用期内如因产品本身质量问题出现不能使用者，由我厂负责“三包”。
- 2、凡属保修范围需要检修（中国境内），请用户随同原发票或复印件到我厂修理部或质管科联系。