

# 胃肠多功能治疗仪-快速纠正胃肠起搏信号

产品名称	胃肠多功能治疗仪-快速纠正胃肠起搏信号
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:治疗、改善类 功能:胃肠起搏点、中医贴敷 型号:CGP-III
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

### 胃肠多功能治疗仪

胃肠多功能治疗仪的基本原理是基于胃肠起搏点的电节律活动可被外加的不同频率的电流所“驱动”，利用先进的电子技术，模拟正常的胃肠生物电信号选择适宜的起搏参数，通过体表贴敷电极，作用于胃肠起搏点，并使它产生“跟随谐振”效应，从而纠正异常的节律性收缩及推进运动，缓解或消除胃肠功能紊乱的症状，从而达到治疗的目的。传统的拟生物电信号为标准的方波或三角波，不能很好的模拟正常胃肠电信号，所以其对胃肠起搏点的刺激作用较弱，易产生适应性，起搏点作用单一且不持久。胃肠治疗仪基于“胃肠起搏”的基本理论，采用更加利于接受的合成电刺激信号，优化了起搏信号和参数，并加入中医的穴位电疗法。

胃肠动力治疗仪是采用高科技智能生物音频技术、数字合成技术，生产成特定胃肠生物起搏电信号，对胃肠起搏点进行刺激起搏，结合起搏介质，纠正异常胃肠电节律，抑制异位起搏点的电活动，来治疗各种功能性胃肠疾病的仪器。

### 胃动力治疗仪产品特点：

- 1、胃肠动力治疗仪采用智能数字化的生物音频电技术，模拟合成接近人体自然胃肠电波形的“起搏信号”，综合“信号起搏，穴位疗法、精神疗法、免疫疗法、药经疗法”等疗法治疗；
- 2、效果显著，生物音频电，无耐受性，起搏点效果持久有效；
- 3、市场需求符合国家医改政策，产品技术门槛高，竞品少，有收费项目，医保报销。

### 数字音乐胃肠治疗仪如何进行治疗？

#### 1.胃肠起搏（图中黄线表示）

将起搏电极贴于胃起搏点在体表的投影位置（正极至于剑突与肚脐连线中点，向右旁开2-4cm处；负极至于中点向左旁开3-5cm再往上1cm处）。

## 2.穴位刺激（图中绿线表示）

将穴位刺激电极贴与双脚足三里穴位处（该穴位为胃肠功能的主控穴位），也可贴于合谷穴。

## 3.音乐疗法（图中黑线表示）

治疗过程中头戴耳机聆听音乐。刺激的强弱随着音乐的高低起伏同步变化，犹如音乐喷泉。

## 4.每次治疗20-40分钟，一天两次，7天为一个疗程。

操作简单，无需护士陪同！

数字音乐胃肠治疗仪产品适用范围：