

蓝屏健康使者数码经络理疗仪厂家专线

产品名称	蓝屏健康使者数码经络理疗仪厂家专线
公司名称	深圳市优立盾实业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡镇固戍
联系电话	13823299472

产品详情

蓝屏健康使者数码经络理疗仪厂家专线13823299472

ST-019蓝屏数码经络按摩仪

1、使用前的准备： 装入电池：将电池盖轻轻地拉开，再将7号电池3节按照正负极位置装入。

准备电极：将贴片的保护纸轻轻撕下，使用完后，再将贴片贴在绕线板上。

电极位置：用湿毛巾将要治疗的部位擦干，去掉油渍和汗渍，再将电极片直接粘贴在治疗部位，两个电极片需同时放置于体表，否则无法进行治疗，电极片无须对称放置。

2、具体的操作方法： 打开电源：按一下开关，液晶显示屏呈开机状态，同时治疗治疗模式指示箭头指向针灸模式，此时强度为0，定时15分钟。

选择中英文显示：按动中英文显示键，显示屏可转换中文或英文。

调节强度：按压强度调节键，调节到合适强度。 定时选择：可选择5-15分钟，每按一次增加5分钟

功能部件名称：

1、输出电极插孔：连接输出电版。 2、超大液晶显示屏：直观同步显示本机状态。 3、电源开关键：开机/关机功能。 4、中文/英文显示键：按此键可显示液晶屏幕显示中英文。 5、功能选择键（模式键）：本机特有的八大功能，针灸、捶击、按摩、火罐、刮痧、瘦身、免疫调节，按此键一次即变一种治疗模式，八种模式可依次循环选取，开机时仪器自动自动进入针灸模式。 6、定时键：每按一次此键增加5分钟定时，最多15分钟定时，开机后自动定时15分钟。 7、强度增强键：增加治疗强度，每按键一次，增加一个强度单位，最大为15。 8、强度减弱键：减弱治疗强度，每按键一次，减弱一个强度单位，最小为0。

技术参数：产品尺寸：153*68*28mm 彩盒尺寸：24.5*19.5*5cm 电池：3*AAA（4.5v）

每箱数量:40pcs/箱 外箱尺寸:53*40.8*49.3cm 每箱净重:7.4kg 每箱毛重:8.5KG