

# 血液透析轮椅体重秤技术参数

产品名称	血液透析轮椅体重秤技术参数
公司名称	上海楷亚科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:楷亚 型号:SCS-YCH 量程:300kg
公司地址	上海市奉贤区场中路629号
联系电话	18201945437 13262637859

## 产品详情

血液透析轮椅体重秤技术参数

量程：300kg

等级：III级 分度数n=3000。

输入信号：1.0 ~ 2.0 mV/V。

A/D转换速度: 40次/秒。

供桥电压：5V DC 可驱动4个350W的或8个700W的传感器。

A/D分辨码：30万。

电压：220V 50HZ。

内装：6V/10Ah免维护电池，充电后可连续工作24个小时。

工作温度：-10 ~ 40 。

工作湿度：<85%RH。

轮椅秤高端品质，价格合理，全国有售后服务，超低坡方便推轮椅上秤，配双扶手，称重数据对接医院系统

轮椅秤使用注意事项：

1. 在使用过程中，不要超过产品的较大称量范围，如果负载过重，会毁坏产品。建议购买的时候买比货物重量大一点量程的轮椅秤。
2. 长期不使用时，应将电源开关从电源上拔下来，供电电源需良好接触。
3. 要在在常室温下使用，不要放在过冷或者热的环境中。
4. 连接件每半年进行一次保养，支承头部涂上黄油。
5. 经常检查限位间隙是否合理，限位螺栓与秤体不应碰。
6. 避免剧烈摇晃，落地或震动，确保轮椅秤的碰撞。
7. 定期对申请专检机构进行检定，确保准确度符合规定要求，发现问题及时进行调
8. 仪表不能在阳光较强的环境中使用，放置地点应较平衡。
9. 请把医用透析轮椅秤放在清洁的环境中，灰尘，泥土，潮湿，震动，气流以及至于电器附近都会影响产品的精度。

上海楷亚科技有限公司是一家致力于工业称重、和流水线滚筒称重控制系统、自动检重秤（包装灌装）智能配料、过程控制等领域产品的研发、生产和销售。根据项目需求，擅长结合客户的工况现场为客户量身订制开发各类工业生产过程中的整体称重优化方案。对项目的功能、性能、安全、可靠性等各个方面进行全面验证，为客户提供贯穿整个价值链的称重、分析和产品检测解决方案，帮助企业简化流程、提高生产率，有效推动企业的发展。

我们是一家做高品质的工业称重衡器厂商。多年专注称重技术，只为做好每一台电子秤，让称重结果变的更可靠。支持全功能定制服务！