

溢泉 轮椅 电镀车架轮椅 皮革座便轮椅 双刹车轮椅

产品名称	溢泉 轮椅 电镀车架轮椅 皮革座便轮椅 双刹车轮椅
公司名称	溢水康医疗器械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区花园北路河岸花都西区13-2-401
联系电话	18134739929 15981959285

产品详情

溢泉 轮椅 电镀车架轮椅 皮革座便轮椅 双刹车轮椅 产品详细说明 【产品品牌】溢泉

【产品型号】：YQ-09B

【产品简介】：整体铝合金车架，液压悬挂，皮革座便，全躺车身，带便盆。

【产品特点】：全躺车身 液压悬挂 【产品保养】：

- 1、轮椅在使用一段时间后,必须检查各部位机动,螺栓是否松动,若有松动现象应及时调整。
- 2、活动部位应经常添加润滑剂。
- 3、轮椅使用后,应擦干表面水气、污染擦干净,防止生锈。
- 4、坐垫、靠背等应保持干净,以防止肌肤感染。 【使用注意】 1、轮椅车在没气和气压不足情况下,请不要使用,否则会损坏车胎,车胎充气时应注意气压合适,不要过满防止车胎爆胎。
- 2、刹车是用来在上、下轮椅车祸停靠不平道路时期我能顶轮椅车的作用,不是用来制动行驶中的轮椅车的。
- 3、轮椅使用者严禁坐在轮椅车上被任何形式的运输车辆运输。
- 4、在使用轮椅前请在有陪伴者的情况下联系使用轮椅。
- 5、在没有防倾装置的轮椅车上,请不要坐在轮椅上做后扬动作。
- 6、在使用轮椅的情况下,请不要向一般倾斜轮椅,不可抬起轮椅。
- 7、严禁在行进过程中使用刹车,如果在无陪伴者情况下,可握紧手推圈,逐渐制动。
- 8、严禁使用者站立在踏板上,会使轮椅翻倒。 订购热线:0371—55011126

18037186568 15981959285 卢曼丽 工作:159819592 尊敬的顾客您好:

本店轮椅自售出之日起保修2年,每张轮椅都有本公司的保修卡说明书。

1、产品结构的组成:

产品为钢管电子智能喷涂型手动轮椅车,该产品主要有椅架,靠背,坐垫,扶手,脚踏板,前后轮大轮刹车等部件组成。 2、产品原理及预期用途 本产品以乘坐者用手直接驱动后轮

或陪伴者手推动为动力,供行动困难的残疾人,**及年老体弱者做代步工具。 3、

正规厂家生产,有医疗器械注册许可证,符合国家标准,质量有保证,请放心购买。

产品性能及结构特点: 轮椅主要适用于老年人,**,残疾人。结构美观大方,乘用舒适宽敞,承重性强,本产品折叠设计新颖,压、拉力配合得当,故此折叠灵活,推行方便。 使用方法:

轮椅乘坐前请将脚板竖起,坐稳后放平脚板,系好安全带,双手同时向前或向后搬动手轮,使乘坐人前进或后退。行进过程中适当调节手轮,则可获得任意角度。 高靠背轮椅在原地使用过程中需要调节靠边背角度时,必须将两个后支架支好再使用。在行进过程中如无监护人看护,请勿擅自调节靠背角度。 维护保养: 保持车身清洁,置于干燥通风处,防止车身生锈,转动

部位经常加少量润滑油，轮胎保持气压充足，不可与油、酸及高温热源接触以防老化变质。
订购电话：15981959285 18037186568 0371-55011126 卢曼丽 工作QQ号：159819592 159819593

芦曼丽女士(经理) 电话：86 0371 55011126 移动电话：18037186568 传真：86 0371 55011126 地
址：河南郑州郑州市金水区花园北路河岸花都西区13-2-401 邮编：450000 Email：159819592@qq.com
公司网站：<http://shop65500005.taobao.com>