

犬伤清创机-规范处置犬伤创面的重要性

产品名称	犬伤清创机-规范处置犬伤创面的重要性
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

创伤冲洗机SP-CXQ100B设备特点：

- 1、脉动冲洗压力8-12PSI，不会造成裸露组织的水肿。适用于大面积快速清创，如急诊科犬咬伤患者，被咬伤后正确及时的处理伤口，是防治狂犬病的一道防线，如果及时对伤口进行了正确处理，和抗狂犬病暴露后治疗，则可大大减少发病的危险。外伤冲洗器可使创面及裂缝中的异物细菌在人体可承受的安全值压力范围内被翻动和冲掉，实现多方位，大水流适度压力的清创。
- 2、多种冲洗方式（碱性皮肤黏膜清洗消毒剂、清水）自动反复交替冲洗（完全满足狂犬病暴露预防处置工作规范要求），也可以手动冲洗。均为一键操作。参数记忆，应用维护方便，操作简单
- 3、冲洗液温度可设置在30 ~40 区间恒温，有助于提高除菌率和舒适度。用途：广泛适用于急性创面，如外伤、手术伤、犬咬伤

创伤冲洗机SP-CXQ100B可行性论证：

随着发布的《规范》和疾控中心《指南》的落地，动物咬伤的冲洗日趋规范，我单位目前采用传统冲洗方式，手工冲洗，冲洗压力不能控制、没有规范，冲洗效果差，冲洗温度无法**控制；规范要求的15分钟冲洗时间难以控制，没有凭证；规范要求的交替次数和交替过程难以实现，没有凭证；冲洗过程没有凭证，发生纠纷无法免责；使用非医疗器械进行伤口处置，有很大的法律风险。而传统冲洗液肥皂水的无菌环境无法保证，20%浓度无法获得；肥皂液侧重于弱碱性环境的病毒灭活，对于其它细菌病毒去除能力不佳。采用专用的犬咬伤清创机能够**控制冲洗流量和压力，以医学推荐的压力冲洗伤口，冲洗效果更好，恒温冲洗，患者体感舒适；设备自动程序控制，一个自动流程冲洗时间设定为16分钟，自动交替冲洗5个以上周期；冲洗结束，打印规范冲洗凭证，患者签字确认，规避法律风险；设备属于注册二类器械，处置伤口合规。专门的犬咬冲洗液无菌环境生产，**配比，一次性使用；冲洗液在提供碱性环境灭活病毒的同时，更重视冲洗效果，物理去除病毒效率更高，专用冲洗液去除细菌和异物，降低感染和并发症风险。