

犬伤清创机-P-CXQ100B型 高效冲洗 长久杀菌

产品名称	犬伤清创机-P-CXQ100B型 高效冲洗 长久杀菌
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 容量: 300ml 压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

犬咬伤清创机

犬伤清创机治疗机理

快速脉动压力清创选用安全水压将产生出脉冲压力水,使创伤组织表面在收缩和舒张之间有规律的反复交替出现,冲洗液中的水流气泡破裂产生的推力,将使夹杂在创面的污染物松动并被水流带走。

通过冲洗液的多种物理联合作用可清洗创面的异物,这种清创主要用于大面积开放性创伤。使用中冲洗枪的脉动压力水流在医务人员的操作下可以从任意角度针对性地冲洗创面,大大提高清创的速度和洁净度。这种冲洗方法明显优于传统的创面处理方式,大大减少借助纱布擦拭的次数、减轻患者的痛苦,大面积冲洗速度快捷、方便、清创时间缩短,深度伤口也可得到清洗,避免发生二次污染,固体杂物和液体污物一同被清洗,冲洗后的污水容易回收、便于集中处理。

创伤冲洗机SP-CXQ100B可行性论证：

随着发布的《规范》和疾控中心《指南》的落地，动物咬伤的冲洗日趋规范，我单位目前采用传统冲洗方式，手工冲洗，冲洗压力不能控制、没有规范，冲洗效果差，冲洗温度无法**控制；规范要求的15分钟冲洗时间难以控制，没有凭证；规范要求的交替次数和交替过程难以实现，没有凭证；冲洗过程没有凭证，发生纠纷无法免责；使用非医疗器械进行伤口处置，有很大的法律风险。而传统冲洗液肥皂水的无菌环境无法保证，20%浓度无法获得；肥皂液侧重于弱碱性环境的病毒灭活，对于其它细菌病毒去除能力不佳。采用专用的犬咬伤清创机能够**控制冲洗流量和压力，以医学推荐的压力冲洗伤口，冲洗效果更好，恒温冲洗，患者体感舒适；设备自动程序控制，一个自动流程冲洗时间设定为16分钟，自动交替冲洗5个以上周期；冲洗结束，打印规范冲洗凭证，患者签字确认，规避法律风险；设备属于注册二类器械，处置伤口合规。专门的犬咬冲洗液无菌环境生产，**配比，一次性使用；冲洗液在提供碱性环境灭活病毒的同时，更重视冲洗效果，物理去除病毒效率更高，专用冲洗液去除细菌和异物，降低感染和

并发症风险。

创伤冲洗机SP-CXQ100B在医疗、教学和科研工作中的作用：

- 1、采用外伤冲洗器能够有效地解决目前科室在清创上的痛点问题，提高清创的质量和速度，减轻医护人员的工作强度，并且对于患者治疗效果好，伤口恢复快。清创时根据伤口面的深浅，适当调整枪头与伤口清创面的距离，可达到普通清创器械不能到达的部位，实现彻底清创。
- 2、科研：好的清创设备有利于开展临床的学术研究，探究先进清创方法与传统清创的区别，为科室科研工作提供好的工具。
- 3、其他：弥补科室先进清创设备的空白，不但在临床上有很大价值，而且对科室有很大的社会价值。

创伤冲洗机SP-CXQ100B收费项目名称：

大清创 收费编码：120500001

中清创
收费编码：120500002

小清创 收费编码：120500003

安装地点及环境条件要求 安装对地点及环境条件无特殊要求，科室场地，能够保证该设备的正常运行和使用操作人员技术力量的状况
设备操作简单，科室人员能够操作并保证该设备的正常运行和使用调研报告：

- 1.该设备临床使用疗效好，得到患者的认可临床的推崇。
- 2.国内已具备生产本设备的技术的条件，可以达到临床需求。8-12PSI的安全水压可以彻底有效的清楚伤口中的异物、细菌。
- 3.在不增加人员和特殊诊疗场地和设备的情况下，可以使一部分病人不再流失（转院），为本院带来更多的直接经济效益。