

供应科崎牌FK-03A、 B、 C型 盒式助听器 老人助听器 ， 欢迎订购

产品名称	供应科崎牌FK-03A、 B、 C型 盒式助听器 老人助听器 ， 欢迎订购
公司名称	中山市小榄镇科崎仪器厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇民安中路12号
联系电话	86 0760 22106820 13527192941

产品详情

药（械）准字	粤食药监械（准）字2010 生产许可证 第2460107号	粤食药监械生产许2001021 6
有效期	6（月）	一次性使用 否

产品品牌：科崎盒式助听器系列

产品型号：fk-03a fk-03b fk-03c

主要性能指标：

1：最大饱和声最输出：123 ± 5db

2：谐波失真15%（1khz）； 10%1khz）

3：满档声增益： 40db

4：等效输入噪声： 30db

产品特点

1：适合于轻度，中度，重中度听力损失人士。

2：噪音低，失真小。

3：使用方便。

产品组成

由主机，耳机，导线，硬胶坐，软胶粒组成。

使用方法1：按箭头方向，打开主机壳，正确放好电池。

2：把耳塞连接坐（硬胶坐）接到耳机上，再把软胶粒接到硬坐上，将导线按大小插孔对应插入耳机，再将导线的另一端按插孔大小插入主机。

3：将开关拨到“n”档，根据电位器旋钮由小到大调节音量。有1-6档，按自己的听力调节到最合适的声音，即可使用。

4：o档为关机档。

如何佩戴助听器

1：初佩戴助听器时，都有一个适应过程。初戴时间宜短到长，音量宜小到大，交际场所宜静到噪。

2：怎避免啸叫声：先将助听器音量调到最小，然后将耳塞塞入耳朵，并且一定要塞紧，不能有一丝透气。再将音量慢慢由小到大地调节到适合自己。

3：如果耳塞无法塞紧，就换另一个自己适合的耳塞试试。

使用助听器时如遇到下列问题

1：助听器没声音检查方法：

1) 开关是否打开

2) 电池是否按正确方法安装

3) 电池是否有电

4) 电池仓正负极是否接触不到

5) 耳塞是否给杂物堵塞

6) 耳机是否已坏，导线是否已断

2：声音微弱或者模糊 检查方法：

- 1) 是否电量不足
- 2) 耳机故障

储存方法

- 1：存放在干燥通风的地方
- 2：助听器不用时要关机
- 3：如果长时间不用，要取出电池，以避免电池爆列而损坏主机。

工艺：片状。颜色：（绿蓝）导线长度：90公分。

电池：1.5v 5号电池 生产执行标准：yzb/粤0707-2009

有中文：英文两种包装。彩盒内是塑料盒。每个包装120台。欢迎来电洽谈。价格洽谈。0760-22106820
13527192941 张小姐。