

厂价科崎牌FK-168耳背式助听器 老人用品，欢迎订购。

产品名称	厂价科崎牌FK-168耳背式助听器 老人用品，欢迎订购。
公司名称	中山市小榄镇科崎仪器厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇民安中路12号
联系电话	86 0760 22106820 13527192941

产品详情

药（械）准字

粤食药监械（准）字2010 生产许可证
第2460107号

粤食药监械生产许2001021
6

一次性使用

否

产品品牌：科崎牌耳背式系列

产品型号：fk-168

主要性能指标

1：最大饱和声输出：123 ± 5db

2：满档声增益：40db

3：谐波失真：15%(<1khz); 10%(1khz)

4：等效输入噪声：30db

5：工作电压1.5v

6：工作电流 < 8ma

产品特点

1：适用于轻度 中度重中度听力损失人士。

2：噪音低，失真小

3：佩戴方便

产品组成

由主机，耳机，软胶粒，硬胶坐

使用方法

1：打开电池仓，按正负方向放入纽扣电池，把软胶粒插在耳机硬胶坐上。然后把
机子挂到耳后，耳机胶粒塞紧耳朵。

2：将开关拨到n档，再按照电位器旋钮箭头粗细方向调节音量，调到适合，即可使用。

如何佩戴助听器

1：初佩戴助听器时，都有一个适应过程。初戴时间宜短到长，音量宜小到大，
交际场所宜静到噪。

2：怎避免啸叫声：先将助听器音量调到最小，然后将耳塞塞入耳朵，并且一定
要塞紧，不能有一丝透气。再将音量慢慢由小到大地调节到适合自己。

3：如果耳塞无法塞紧，就换另一个自己适合的耳塞试试。

使用助听器时如遇到下列问题

1：助听器没声音检查方法：1) 开关是否打开

2) 电池是否按正确方法安装

3) 电池是否有电

4) 电池仓正负极是否接触不到

5) 耳塞是否给杂物堵塞

6) 耳机是否已坏，导线是否已断

2：声音微弱或者模糊 检查方法：1) 是否电量不足

2) 耳机故障

储存方法

1：存放在干燥通风的地方

2：助听器不用时要关机

3：如果长时间不用，要取出电池，以避免电池爆列而损坏主机。

本产品备有（中英文）两种包装，每个包装120台。可以混批。欢迎来电咨询。价钱面议。0760-22106820
张小姐。13527192941