

儿童物理降温仪-儿童退烧好方法

产品名称	儿童物理降温仪-儿童退烧好方法
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:煜博 产地:河南郑州 核心技术:航天级半导体控温
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

儿童物理降温仪-儿童退烧好方法

产品名称：	舒适型物理降温仪-儿童退烧好方法
产品用途：	儿童退烧散热
包装规格：	常规
国食药监械注册号：	15481643216
专利号：	ZL134613469
使用方法：	冰囊头贴物理降温
产品优势：	安全有效，便捷舒适，医保报销

的病因进行治疗。孩子如果出现发烧，体温在38.5 以下的时候，可以多喝温热的水，用温水擦拭身体，或者给孩子少穿些衣服、少盖被子状态，这样对孩子的发热有缓解的作用。如果体温超过了38.5 ，可者布洛芬类的退热药，一般服药后0.5-1小时左右，孩子就开始出汗，时左右。但是，如果发热原因没有去除，发热还是会出现反复的，这。

不同的病因所治疗的方法会不同，例如孩子扁桃体发炎，一般需要素治疗，相对效果比较好，流感病毒引起的发热，需要适当使用抗病毒所以不同的原因治疗方法会有差异，需要到医院进行明确诊断之后对

冷敷机可使局部细管收缩，减轻局部血管充血，有、止血、解痉、适用于高热患儿和局部炎症疼痛及组织内出血者。对于大片组织受伤慢性炎症和化脓变患儿则应禁用此法。

常规冷敷的方法有两种：

一、冰袋冷敷法。准备好冰袋，也可用热水袋或厚塑料袋代替。将冰的锐角，以免损坏冰袋。将加工好的碎冰块装入冰袋内，约占冰袋容隙，排尽袋内空气后将盖拧紧，擦干袋外水迹，检查确无漏水后，用。

用于高烧患儿降温，可将冰袋置于头部、颈部、腋窝沟、腘窝内侧等于挫伤部位。注意袋内装冰不可太多，以免压迫局部。放置后要注意1次，根据体温变化情况决定增减冰袋数目。一般每30-45分钟将冰袋

个冰袋冷敷，可交替移开。要随时观察局部皮肤颜色，并询问有无异常。如出现皮肤苍白、青紫、麻木、剧痛等，应立即停用，以防局部冻伤。冰袋不宜置于胸部、腹部、枕后。冰块融化要及时更换。

二、湿冷敷法。先盛半盆冰水或刚打上来的井水，再浸入两条毛巾，拧干，以不滴水为宜，然后敷于局部，每隔3-5分钟毛巾就变温了，再换一条冷毛巾。冷敷时间一般为15-20分钟；如病情需要，也可再延长5-10分钟。冷敷后擦干局部。用冷敷法时，腋窝、肘窝、腘窝及沟同时应用。

儿科特殊物理降温仪

医学临床常用冷敷方法：

使用的冷敷机搭配儿童降温小水囊，通过绑带固定在额头上，设备方便、安全、有效。

收费项目名称及编码：121100002

产品说明：

儿科特殊物理降温仪

型号：HW-1200

儿童发烧需要处理两部分，一部分是针对孩子的发热进行降温处理，另一部分是针对孩子的病因进行治疗。