

西门子心电监护仪上电不开机/开机指示灯不亮维修（当天修好故障）

产品名称	西门子心电监护仪上电不开机/开机指示灯不亮维修（当天修好故障）
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:监护仪各种型号维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

西门子心电监护仪上电不开机/开机指示灯不亮维修（当天修好故障）

电受电刀干扰 故障现象：在手术中使用电刀，当电刀负极板接触人体时心电出现干扰。

检查方法：监护仪本身及电刀外壳接地是否正常。 解决方法：给监护仪和电刀加装正常接地。

呼吸信号太弱 故障现象：屏幕显示的呼吸波形太弱，观察不便。 检查方法：检查心电电极片是否放置正确（请参考第四章图4-2），电极片质量如何以及人体接触电极片的部位是否清洗干净。

解决方法：清洗干净人体接触电极片的部位，正确贴放质量正常的电极片。 无血氧数值 血氧值断续 故障现象：检测人体血氧饱和度时，血氧值时有时无。

检查方法：1)做长期监护和手术时，病人手臂是否乱动，造成血氧值断续。 2)检查血氧延长线坏否。

解决方法：尽量让病人保持稳定，一旦由于手的动作引起血氧值丢失，可认为正常。若血氧延长线坏则更换一条。 血压充气不足