

西门子心电监护仪报警SP02无数值（无血氧波行，无血氧数值)维修

产品名称	西门子心电监护仪报警SP02无数值（无血氧波行，无血氧数值)维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:监护仪各种型号维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

西门子心电监护仪报警SP02无数值（无血氧波行，无血氧数值)维修

看看型号对不对，迈瑞公司血氧探头用的比较多的是MINDRAY和Masimo两种，互不兼容。

(3) 看看血氧探头有无红光闪动，若无闪动，是探头组件故障。

(4) 如有血氧初始化错报警，则为血氧板故障。

排除方法：手指探头内如无红光闪动，可能是导线接口接触不良，检查延长线和插座接口部位。气温冷的地区，尽量不让病人手臂暴露在外以免影响检测效果。不能在同一侧手臂进行血压测量和血氧测量，以免手臂被压迫而影响测量。

如血氧显示波形通道显示“无信号接收”，则表示血氧模块与主机通讯有问题，请关机后再开机，若仍有此提示，则需更换血氧板。

测量人体血氧饱和度时，血氧值时偏低，不准确。

检查方法：

（1）首先要问明是针对某一特例还是普遍的。若是特例，可以从血氧测量的注意事项上考虑去尽量避免，如病人运动，微循环不畅，体温过低，时间过长等。

（2）若是普遍的，请更换一个血氧探头，有可能是血氧探头故障引起的。

（3）检查血氧延长线是否损坏。

排除方法：尽量让病人保持稳定，一旦由于手的动作引起血氧值丢失，可认为正常。若血氧延长线坏则更换一条。