

多功能家用翻身床C04 翻身 坐便起身全功能病人翻身护理床

产品名称	多功能家用翻身床C04 翻身 坐便起身全功能病人翻身护理床
公司名称	上海牧羊人护理床防褥疮床垫专卖店
价格	2280.00/台
规格参数	
公司地址	闵行区莘庄镇春申路3758号
联系电话	021-67685123 15901748479

产品详情

促销优惠:2280元

【多功能家用翻身床C04 全功能病人翻身护理床 产品描述】

多功能家用翻身床C04 是最新推出的家居型护理病床，该床在产品功能方面做了较大的改进，具备基本的上起身、上/下曲腿、坐便等功能外，采用优质的高强度铝合金折叠护栏，并更具实际护理需要，增加了护理床的左右翻身功能，整张护理床在功能和性能特点方面更加人性化，床骨架钢材用料更厚实，做工更结实。为贴近实际需要，本款床还配套半棕半海绵的功能型床垫（床套可拆洗）。本款型号护理床的特点在于不断改进护理床功能的基础上，并维持床的价格不变。真正做到了物超所值，物美价廉。为广大需要护理的家庭购买者，不仅解决实际生活困难，还节约了购买开支。

[【多功能家用翻身床c04 功能特点】](#)

- 1、该护理床结合家庭实际护理需要，将普通病床、翻身病床、座便器、轮椅车、担架车五者有机的结合于一体，可使用于各类病人，特别是偏瘫病人在患病急性期、稳定期、康复期各阶段的治疗和护理需要。
- 2、该护理床具有体位调整功能，其背位床面、臀位床面、足位床面、侧位床面均可由相应操作机构进行升降调整，使病人完成平卧、侧卧、曲腿、平坐、端坐等各项体位变换，操作简便灵活、省力、可靠。
- 3、该护理床有便孔盖、便盆联动机构，当便孔盖打开时便盆可横向自动送到病人臀下，反向操作则便分横向退出，便孔盖自动关闭。
- 4、该护理床的各操作装置都采用简单、可靠、方便的省力机构，主要结构部件全部用优质钢材制造，整体重量轻，使该护理床成为病人和护理人员的得力助手！

【产品规格参数】

- 1、产品尺寸：2000×900×550mm（长×宽×床面高）
- 2、床面采用优质钢条焊接成型，坚实耐用。
- 3、床头采用医用级ABS床头床尾，可自如拆卸。
- 4、配置：125mm包罩脚轮,外形美观、易于推动床体。
- 5、背部折起角度为： $0\sim 75^{\circ}\pm 5^{\circ}$ ；
- 6、腿部下折角度： $0\sim 85^{\circ}\pm 5^{\circ}$ ；
- 7、翻身角度： $0\sim 45^{\circ}\pm 5^{\circ}$ 。

【多功能家用翻身床c04 标准配置】

- (1) 半棕半棉医用床垫含内胆，外套可拆洗，厚度为6厘米。

(2) 专用特制塑料便盆一只。

(3) 医用铝合金折叠式护栏一付。

(4) 医用万向静音不锈钢脚轮4只(自带刹车功能)

(5) 配备优质工程木料床头一对木质餐桌面板一个(均为环保木料)

(6) 便盆、洗头盆、水盆各一个

【多功能家用翻身床c04 主要功能】

1、起背功能：

起背角度为0-75度。实现背部缓慢升起，摇动轻缓无阻力。起背功能和下曲腿功能是长期卧床病人康复保健所需的护理床的必备功能。

2、左右侧翻功能：

可使病人能够在0-45度任意角度左右侧翻身，翻身后，护理人员可协助病人调整侧睡姿势，使病人侧翻后能够更舒适的休息。病人经常左右翻身可避免褥疮病的发生。对已有褥疮病的患者，经常使其左右侧翻，用温水擦洗。可治停止褥疮并的恶化并有治疗作用。左右翻身功能是长期卧床病人康复保健所需的护理床的理想功能。

3、坐立功能(起背落腿功能)：

可使病人能够在0-80度任意角度坐起。坐起后可配合餐桌用餐或者读书学习。病人长期卧床，姿势单一，其身体机能会慢慢退化，此时需要经常帮助病人变化身体姿势。其中坐姿是最常用且最有效的姿势之一，可以让病人坐起时小腿向下弯曲，符合人体工学原理。方便床上洗脚、泡脚。下弯曲角度可在0-85度之间随意调节。

【多功能家用翻身床c04 适宜对象】

该款多功能家用翻身床使用于老年病人或其他失去生活自理能力病人的日常护理、瘫痪病人翻身困难特殊需要，解决了长期以来普遍存在的病人翻身难,大小便、吃饭、移动、等多方面的问题。并满足患者生理和心理上的要求,提高康复力，大大减轻家庭护理负担,轻松护理。

全国范围内部分地区货到付款.送货上门。

订购热线：021-67685123 021-54155817

15800521158 15901748479

更多产品更多优惠请登陆：<http://www.shjingqu.com>

<http://www.muyangrensh.cn>