

# 造影剂恒温培养箱用于加温造影剂多规格供应

产品名称	造影剂恒温培养箱用于加温造影剂多规格供应
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72759.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 造影剂恒温培养箱用于加温造影剂多规格供应产品说明-

该产品对输入液体，对术中、术后低体温症的预防起到关键作用，减低手术风险。业用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。用于液体药品，医用盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

### 造影剂恒温培养箱用于加温造影剂多规格供应产品参数：

### 造影剂恒温培养箱用于加温造影剂多规格供应使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

造影剂恒温培养箱用于加温造影剂多规格供应相关-低体温的原因分析：自身因素：低体温与患者年龄、情绪、病情有明显相关性，术前紧张、焦虑，会使患者对冷刺激的阈值降低。“冷稀释”作用：手

术过程中患者输入大量与手术间等温的液体、未加温血液、以及术中应用大量未加温的腹腔冲洗液，则起到了“冷稀释”作用[2]。短时间内输入大量4 的库血，不但可造成低温，还可引起心律失常，甚至心脏骤停[3]。

机体散热：手术开始时使用皮肤消毒剂；胸腹手术时，体腔直接暴露于外界环境；手术中常规用湿盐水纱布包裹肠管、擦拭血迹；使用大量室温液体冲洗体腔，均可致散热增加。

术中的低温环境：层流洁净手术室室内空气的速对流，当室温 $<21$  时，患者散热增加，使用层流设备可使对流散热比例升高到61%，而蒸发散热为91%[4]。

的影响：药抑制体温调节，又可以引起外周血管扩张，使散热增加；机械通气时吸入气体的温度和湿度未经适当调整等均可使体温降低。

医护人员保暖意识淡薄：在进行各项操作时，未给患者进行遮盖保暖。

2 低体温的预防：医务人员应引起重视，术中加强手术区以外部位覆盖，避免不必要的暴露。

控制手术室室温，一般临床上将21 作为手术室临界环境温度，高于此温度才能确保患者体温高于正常范围[5]。

输入预热液体：将液体、库血进行加温后输注，是优良简单、优良有效预防体温下降的方法。

术中暂停手术时应用盐水巾覆盖腹腔，以免热散失过多。

术中冲洗液加温至体温水平，以保持患者体温的恒定。

熟练的手术配合，缩短手术时间。

对特殊患者，如病情重、年老体弱、手术时间长、大面积体腔开放者，事先放置好循环加温水毯。

手术一结束，应立即包扎伤口并覆盖保暖。

造影剂恒温培养箱用于加温造影剂多规格供应