

## 病房被服加温柜（恒温柜）

产品名称	病房被服加温柜（恒温柜）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	76599.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 病房被服加温柜（恒温柜）产品说明-

手术室的温度一直以来手术室死亡的三大原因休克、低体温、凝血障碍困扰大家，福意联手术室恒温箱加温液体药品至人体温度，有效避免低体温症的发生。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液等。

### 病房被服加温柜（恒温柜）产品参数：

### 病房被服加温柜（恒温柜）使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

病房被服加温柜（恒温柜）相关-术中输注液体和冲洗液体加温在术中低体温护理中的应用

观察术中输注液体和冲洗液体加温在术中低体温护理中的应用.方法 该院2017年4月—2018年4月接受的68例行手术治疗的患者,按照是否在术中低体温护理中给予术中输注液体和冲洗液体加温将所有患者均分为实验组(34例)与对照组(34例),对照组患者给予常规术中低体温护理,实验组患者给予术中输注液体和冲洗液体加温,观察两组患者手术治果.结果 实验组患者术后苏醒时间、拔管时间耗时均少于对照组( $t=7.621$ 、 $5.265$ , $P<0.05$ ).实验组患者腋下体温高于对照组( $t=8.624$ , $P<0.05$ ).实验组并发症发生率低于对照组(2.9%vs 17.6%)( $\chi^2=5.128$ , $P<0.05$ ).实验组患者对手术护理满意度为94.1%,明显高于对照组( $\chi^2=5.982$ , $P<0.05$ ).结论 对于行手术治疗的患者术中低体温护理中应用输注液体和冲洗液体加温可有效促进患者术后苏醒,有利于降低并发症发生率,促进患者术后机体康复,提升患者对临床护理满意度.病房被服加温柜（恒温柜）