

# 阴道炎宫颈炎治疗与预防 宫颈糜烂修复再生

产品名称	阴道炎宫颈炎治疗与预防 宫颈糜烂修复再生
公司名称	北京龙腾康健科技有限公司
价格	.00/盒
规格参数	类别:妇科防治消杀用品 品牌:珍爱洁特
公司地址	北京市大兴区长子营镇窦营村村委会南200米
联系电话	0180266628 13366716261

## 产品详情

类别：妇科防治消杀用品 规格：350  $\mu$ g/ml，3ml/支，2支/盒 品牌：珍爱洁特  
、120盒/件

功能及用途：阴道炎宫颈炎治疗与 材质：纳米银凝胶与给凝胶器  
预防 宫颈糜烂修复再生

【商品名】珍爱洁特邦尔洁纳米银抗菌水凝胶【通用名称】纳米银抗菌水凝胶【批准文号】  
吉食药监械（准）字 2005 第2640175号【产品剂型】凝胶剂【主要规格】  
350  $\mu$ g/ml，3ml/支，2支/盒、120盒/件

【主要结构】主要由纳米银凝胶和给水凝胶器两部分组成。【销售单位】北京龙腾康健科技有限公司  
全国总经销【产品性能】具有消炎、杀菌、止痒作用。对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、淋球菌、白色念  
珠球菌、真菌、酵母菌等病原体微生物的生长有明显抑制作用。

【适用范围】该产品适用于妇科炎症的抗菌消炎、修复再生。主要用于各种阴道炎、宫颈炎的治疗；包  
括：细菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、混合性阴道炎、淋球菌感染、急性宫颈炎、慢性宫颈炎、宫颈糜烂  
的治疗。

【禁忌症、注意事项】1、对金属银过敏者、处女禁用，孕妇应在医生指导下使用；  
2、经期及孕妇禁深部用药；3、本品仅供妇女生殖道外用，禁口服；  
4、本品仅供一次性使用。包装破损，禁止使用；  
5、切勿与其它外用产品同用，如发生局部过敏反应，应停用；  
6、使用过程中有少量棕黄色糊状物流出属正常现象，如果流出物较多，建议与卫生护垫配合使用。

【使用说明】1、每晚睡前清洗外阴后，将给药器前端的前盖取下，插入给药器后端作为推杆，将装有  
凝胶的给凝胶器缓慢插入阴道深部，利用助推杆将凝胶推入阴道深处。每日1支，连续使用6天为一疗程  
。2、请在医生指导下使用。

【补充说明】该产品经医疗机构临床验证报告结果显示：  
· 可治疗和预防女性生殖道感染；  
· 不影响阴道正常菌群和酸碱平衡；  
· 具有去腐生肌，促进组织修复与再生作用；  
· 是治疗细菌性阴道混合感染、霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、细菌性阴道炎、宫颈炎、宫颈糜烂等各种妇科病症理想产品；  
· 不属于抗生素类，为单体银抗菌水凝胶，不宜产生耐药性，避免了难言的妇科疾病反复发作；  
· 起效、渗透迅速，作用比较持久，可长效杀菌、灭菌；  
· 可迅速渗透皮下，直达病灶。杀菌迅速且缓慢释放，可缩短治疗时间；  
· 杀菌范围比较广泛，医疗机构临床验证报告结果显示，可对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、淋球菌、白色念珠球菌、真菌、酵母菌等病原体微生物的生长有明显的抑制和杀灭作用；  
· 杀菌修复、再生：可有效改善创伤周围组织的微循环、激活并促进组织细胞的生长，加速伤口的愈合。  
· 珍爱洁特纳米银抗菌水凝胶为抗炎杀菌缓释凝胶剂，不影响人体的正常菌群平衡，不易产生耐药性，同时可稳定、创新、修复阴道生态菌群平衡，有效抑制妇科炎症的复发；具有去腐生肌，促进组织修复与再生的作用。

【咨询电话】01080266628