

## 第二代批发 包皮阻复环 包茎矫正器 男用水晶套环包皮过长治早泻

产品名称	第二代批发 包皮阻复环 包茎矫正器 男用水晶套环包皮过长治早泻
公司名称	邢玉峰
价格	.00/个
规格参数	类别:男用器具 规格:1件 品牌:ZXAR
公司地址	中国 河南 许昌市 北大街145号
联系电话	86 0374 2126065 13782378010

### 产品详情

类别：男用器具

规格：1件

品牌：ZXAR

功能及用途：包皮矫正

材质：软胶

包皮过长，我们绝对有一套!正品第二代，2012年最新授权专利产品!

本专利产品是完全根据人体学原理，根据阴茎冠状沟的形状，精心设计做模，采用进口顶级弹性硅胶，在高温下一次性成型的包皮阻复器，使用男士能很好的解决包皮过长的问题。

阻复器的问世，为包皮过长人士开创一条非手术治疗包皮过长问题的途径。值得提示朋友们的是，即使是计划做包皮切除手术的人士，本产品也能帮助到他们，佩戴包皮阻复器可显著降低龟头敏感度，为配合医生，顺利渡过包皮切除后之阴茎敏感勃起及伤口愈合期，做术前准备，预防意外惨剧的发生。

阻复器有4种型号：少童号、小号、中号、大号。

测量方法：取来一条线，在jj疲软时套进冠状沟内一圈，剪掉多余的线，再测量线的长度。55mm以下的选少童号，50-72mm的选小号,68-90mm选中号,82mm以上选大号。（注：阻复器的伸展适用幅度大，在jj增大一倍及缩小一半时，能抱定jj不会脱落，也不会紧勒jj；所以选用自由度大，一般是两种型号都能佩戴使用。晚上使用稍大一点的，白天运动使用稍小点的。所以建议您一次最少购买两款型号，达到最佳的矫正效果）

提示：一般亚洲人士选小号或者中号，欧美及非洲人士选中大号！店主朋友大鸟型亲试：小号中号感觉都可以！

正常情况%50选择的是中号，%40选择的小号，其它选择的是少童号和大号。

【如何更方便的选定适合自己的型号】：

如果你感觉测量看数据很麻烦，就直接选择中号或小号。几乎大部分人都是这个号。除非你是儿童或是平时鸡鸡确实显大就选择其它号。

经多数顾客反应，店主建议一次最少买两个号，即小号和中号。白天运动带小号，晚上睡觉带中号。天冷一点带小号，天热一点带中号。

以上只是经验建议，不是最终结果，具体要视个人情况和感觉所定！

注意一点，这个产品，刚佩戴时会不舒服，特别是包皮严重的人会明显一些。这个是正常现象。你想想，平时整天把龟头藏在包皮里，现在要天天露在外边经过磨擦矫正，刚开始不太舒适也是非常普遍现象的。据调查显示，几乎百分之99的人都会有这种情况。不过带几天后就好了，矫正的，肯定是要有强制性。但是可以放心的是，正牌产品的质量是经常严格试验后上市的，绝对不会对小弟弟带来伤害。坚持下来，对于百分之99的人是完全可以改变包皮现象的

本品四大特点：

- 1、采用进口顶级（医疗级）弹性硅胶，干净、卫生、无任何毒副作用，使用绝对安全。
- 2、光滑圆环设计，没有棱角，利用光滑圆壁阻挡包皮复原包住龟头，佩戴不会伤身体。
- 3、采用吻合冠状沟、温柔双臂环抱设计，有开口，在阴茎增大一倍或缩小一半范围内，能抱定、挡住、不易脱落，抱定力度适中，不存在太紧影响阴茎血液循环问题，佩戴时能正常小便，简单、安全、易用。使用感觉很舒适，没有异物感。
- 4、能重复使用，用完一次要用沐浴露清洗，放置干净卫生处。以待下次使用。

官方的说法是一天最少佩带8个小时，连续15天到一个月最佳。具体时间据一些老顾客反应，因人而异，坚持一个月绝对是有效果。但是想完全达到满意，最少要还再坚持一两个月左右。因为一个月后包皮虽然外露正常了，但是也很容易下翻。所以以后是巩固期。带起来也很简单方便，并不会带来很多麻烦和不便。白天晚上均可以佩带。

为什么一定要改善包皮过长？

一、无为而治的为害

1，包皮过长影响阴茎龟头生长发育。

在青春发育期，由于龟头被包住，得不到外界的应有刺激，阴茎的发育会受到影响，无法达到最大的潜能??

2，包皮过长引发性生活早泄。

成年人，由于龟头被包住,得不到外界的应有刺激,龟头会非常敏感，因而导致性生活早泄的发生。

3，包皮过长容易导致各种炎症甚至疾病的发生。如果自己平时比较注意清洁卫生，此情况应不会发生。

## 二、手术切除的风险：

1.

导致阴茎变短。切除包皮，可能会影响阴茎的生长和膨胀伸长，无法达到最大的潜能，甚至会疼痛难忍。

2.手术失败的风险。包皮切除手术整个过程都要小心应对，手术失败的事件经常发生，轻者影响性生活，重者没了性生活。

3.心理身体适应的风险。切除包皮后，身体及性生活发生了变化，有可能射京太不敏感没有性欲望啦，有可能房事时间太长身体吃不消啦，等等，切掉包皮可能身心一辈子都会受到伤害。

如何解决过长包皮的为害而又避免带来风险？答案是：使用包皮阻复工具，如包皮阻复器。

1，轻松阻隔包皮裸露龟头。 阴茎龟头能正常发育生长，达到最大潜能； 龟头得到磨蹭刺激，敏感度下降，相应的房事时间延长，早泄问题得到解决； 有健康没炎症没臭味没风险。

2，短期治标，长期治本。 短期看，一佩戴包皮阻复器即达到上述手术切除包皮的效果； 长期看，长大的龟头能全天候阻挡皱缩包皮的回复，彻底解决包皮过长问题。

3，经试用者体验，严格按照规定操作的如 穿粗棉内裤； 经常隔内裤揉搓、反方向撻推龟头； 有耐心，连续佩戴。

3天见效，3个月内能延长房事时间15-30分钟，3个月内包皮已经能在冠状沟上停留，不易回复；

1年内阴茎能增长1厘米，龟头膨胀周长能增大1厘米，并能完全阻挡包皮回复，彻底解决包皮过长问题；

无年龄限制，不过年纪越小效果越显著。

## 一、设计理念：

用物理的非手术的方法解决包皮过长的问题。采用椭圆开口双臂环抱式设计，方便放进冠状沟内，弧度贴合龟头边沿，能温柔抱定阴茎，阻挡包皮回复，不会过紧压迫阴茎影响血液循环（佩戴时可正常泌尿），使用安全，还能随时随地随阴茎变化而自动开合调节。

## 二、作用原理：

本产品的佩戴使用及配套操作，能很好的体现‘用进废退’的原理。

其一，阻复器阻挡包皮复原，裸露的龟头就能得到外界的磨蹭，触发阴茎龟头再发育，年纪越小，效果越好；另外，龟头裸露得到不断磨蹭，敏感度会不断下降，相应的，使用者房事质量会不断提高。

其二，龟头边沿得到不断撻推摩擦，会慢慢增大长高，对应的包皮长期挤在一起会慢慢皱缩，此消彼长的结果，是龟头最终完全自行挡住包皮的复原。

## 三、使用方法及效果：

用清水将阴茎洗净、擦干，把包皮往后推，露出龟头冠状沟，把阻复器的双臂分开，轻轻的放进冠状沟里，双臂会温柔地抱定阴茎，阻挡包皮复原。

佩戴阻复器后，龟头环境由湿润变为干燥，包皮分泌物很快风干，不再影响提高鬼头的敏感性，而且龟头能完全接受外界的磨蹭，敏感度会进一步降低，这样能达到解决因包皮过长而导致早泄男士之烦恼的目的，而且简便、安全，不会像使用药物和动手术一样会带来一系列的副作用、高度的风险和烦恼

四、增效配套操作方法1.穿粗棉内裤，在方便时用手隔布揉搓龟头，每天数次，对降低龟头敏感度有显著效果.2.还要经常反方向撻推龟头边沿，促使龟头边沿长高.

五、适用对象：1.包皮过长男士，保持龟头部分干爽，清洁，减缓或解决早泄，提高房事质量。2.计划做包皮切除之男士，可显著降低鬼头的敏感度，为配合医生、顺利渡过包皮切除后阴茎敏感勃起及伤口愈合期做术前准备。

六、注意事项：要穿平脚内裤，以免阴茎缩小太多时包皮阻复器掉落。在激烈运动时，如打篮球、足球、拳击等对抗运动时，要取下包皮阻复器或是带比较小号的，以免发生掉落。在房事时，禁止佩戴包皮阻复器

本店所售包皮环厂家直接提货，全部正品，新鲜一手货，请大家放心购买。效果是经过本店多数老顾客，以及本店部分员工试验反应的口碑产品。为什么我们会推荐，因为有效果。

另外要正确使用，轻轻扩张只要套在阴茎上就可以，不要特意使劲的拉，也不要您尖锐的指甲来实验毕竟是硅胶的，薄弱的地方不要拉坏了哦！

最后在这里给正在犹豫如何解决包皮过长的朋友们说一下。如果您只是包皮过长但还可以下翻到龟头后边的话，就用我们的产品吧。包皮过长不是病，根本没有做手术的必要，除非你不怕疼不怕麻烦还怕手术产生的一些副作用。用矫正环，一是安全，二是有效，三是不知不觉中让你解决最想解决的问题。您还在想什么？

最后祝所有有包皮过长问题的男性朋友，早日解决问题，恢复男儿本色。做一个让她离不开的性运男人！