

穴位磁疗灸 承接OEM贴牌代工 广告批文

产品名称	穴位磁疗灸 承接OEM贴牌代工 广告批文
公司名称	吉林省博仕佳医药有限公司
价格	.00/件
规格参数	山西健康动力:穴位磁疗灸 产地:山西
公司地址	长春市绿园区西安大路3999号金地梧桐华府7号楼2层207室（注册地址）
联系电话	13910589912

产品详情

穴位磁疗灸说明书

【产品名称】 穴位磁疗灸

【型号】 圆形、方形

【规格】 30、 40、 50、 60、 50mm × 70mm、 60mm × 60mm、 70mm × 70mm、 70mm × 100mm、 80mm × 110mm、 90mm × 120mm、 90mm × 130mm、 90mm × 140mm、 100mm × 120mm、 120mm × 150mm

【结构组成】 穴位磁疗灸由无纺布、热熔胶、离型纸、磁片组成。

【适用范围】适用于多梦易醒、醒后不眠、急躁易怒、神疲健忘等失眠引起的症状的辅助治疗。

【产品性能】穴位磁疗灸利用磁场强度20mT - 200mT的磁体作用，贴敷于对应穴位，对穴位进行刺激。

【使用方法】

使用前请清洁贴敷部位皮肤，沿缺口处撕开密封包装袋，取出产品，揭去离型纸，将贴片对准穴位（穴位请参照穴位图，如不能取穴，请在医护人员指导下使用），每贴使用6-12小时。建议贴敷部位为安眠穴、中腕穴和内关穴。

【禁忌症】

- 1.金属异物局部、心脏起搏器局部及其邻近禁用。
- 2.严重的心、肝、肺、肾衰竭的患者禁用。
- 3.出血及有出血倾向者禁用。
- 4.孕妇下腹部禁用。
- 5.对磁疗有明显不良反应者禁用。
- 6.体质极度虚弱者禁用。
- 7.进入强磁场者禁用。

【注意事项】

- 1.使用前清洁贴敷部位。
- 2.请勿贴敷在皮肤过敏处。
- 3.若皮肤有不适感，请立即停止使用。
- 4.本品为外用一次性产品，请勿反复使用。
- 5.对磁场敏感者如产生头晕、呕吐等晕磁现象，应立即停用。

【储存方法】应贮存在通风干燥处，无腐蚀性气体的室内。

【配件清单】穴位磁疗灸、说明书、穴位图。

【有效期】二年

【生产日期】见外盒

【生产许可证号】晋食药监械生产许20160009号

【产品注册证号】晋械注准20192200058

【产品技术要求】晋械注准20192200058

【注册及生产企业】山西健康动力医疗科技有限公司

【注册地址】侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层

【生产地址】 侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层

山西省临汾市曲沃县乐昌镇苏村东华街1号

【编制日期】 2019年03月31日

【服务电话】 400-006-3721

【售后服务单位】 山西健康动力医疗科技有限公司