

内分泌——多功能超声清创治疗机56kpa安全水压

产品名称	内分泌——多功能超声清创治疗机56kpa安全水压
公司名称	重庆腾跃医疗器械有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	重庆腾跃:具有液体控温功能 MUI-K1/T8:有效超声工作频率40kHz ± 1kHz。 重庆:配备进口脚踏开关
公司地址	重庆市沙坪坝区都市花园中路80号附9号4-1 (注册地址)
联系电话	18339243155

产品详情

伤口擦洗

擦洗是临床常见的伤口清洗方法，常用于伤口普通换药。其方法操作简单，使伤口及周围皮肤清洁。擦洗用品可选用纱布或绵球。纱布较粗糙，可增加伤口清洗的清洁效力，用于污染较严重的伤口清洁。由于擦洗所用的 纱布或棉球的纤维易残在于伤口内,造成异物反应而引发感染;擦选对伤口内肉芽组织有机械性损伤，增加局部出血和疼痛的概率，影响伤口的愈合，因此擦洗仅作为伤口清选。

伤口冲洗

脉冲式冲洗法:临床*常用的冲洗方法，是利用脉冲冲洗设备，用一定的压力脉冲水流持续冲洗伤口床。通过水流所产生的脉冲振动作用，达到去除细菌、异物、坏死组织，创造无菌的创面愈合环境。国内研究显示，脉冲 冲洗法可以有效清洁糖尿病足溃疡的伤口，促进伤口肉芽组织的生长，提高愈合率。喷射水冲洗法:临床上. 常用于外伤伤口的清洗，尤其是污染较重伤口。其原理是通过特殊的冲洗装置而产生喷射水流，离伤口表面3~ 5cm 的距离冲洗，细菌清除率**。相关研究指出，5~8PSI (磅/平方英尺)的冲洗压力为其理想冲洗压力，压力过高或过低会增加组织损伤及水肿或造成清洗不充足而增加感染率。

高压水冲洗法:

临床上应用于严重感染的慢性伤口。其原理是利用其压力作用，通过去除伤口内80%的感染因子，有效地减少细菌污染的程度，并降低伤口感染发病率。其理想压力为7PSI。

MUI-T8S多功能超声清创机具有三大功能：

1、超声波清创机是利用40kHz的超声波震荡频率产生的空化效应去除创口上的腐烂组织和异物（该空化

效应会在局部产生极高的气泡压力和微射流)，该效应不会对健康组织造成损伤。

超声波清创（多功能清创机功能一）对感染伤口，慢性难愈合伤口处理效果非常明显。

超声波清创产生的空化效应能有效去除细菌、真菌、坏死组织、对正常组织无损害，不直接接触患处从而达到无痛清创目的。

清创过程中不会损伤伤口周围的神经和血管，对正常组织以及新生肉芽组织无损伤无任何副作用。

能激活成纤维细胞，促进纤维蛋白层的合成，改善伤口环境，促进伤口愈合。

清创时根据伤口面的深浅，适当调整刀具与伤口清创面的距离，也可达到普通清创器械不能到达的部位，实现彻底清创。同时可是药物能迅速进入深层组织，并能促进生长，加速愈合。

2、压力清创（多功能清创机功能二）选用56kpa安全水压，利用脉动水流的瞬间压力变化使得肌肉等组织中的异物更容易被冲掉。

压力清创适合各种大面积创伤。急救、及各种术前、术后的清创，清创迅速、清洗彻底、视野清晰、从而提高手术质量，赢得抢救时间。

3、连续或间断地负压吸引（多功能清创机功能三）可减轻间质水肿，清除过多伤口渗液，减少感染，保持工作环境的清洁。

独有的负压回收、液位探测、液位报警，液位自锁功能，杜绝废液溢出。

适用范围：各类外伤、大面积创伤、烧伤、车祸伤、开放性骨折，长期难愈合伤口，感染伤口，例如足溃疡，褥疮，化脓性创伤，创面窦道等。 收费项目及代码：大清创：120500001 中清创：120500002 小清创：120500003