

需亚克力胃镜消毒槽肠镜清洗槽|内窥镜清洗消毒槽首选荣达

产品名称	需亚克力胃镜消毒槽肠镜清洗槽 内窥镜清洗消毒槽首选荣达
公司名称	泰州市荣达医用器材厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州江苏省泰州市白马将军北路
联系电话	0523-86181592 13952635049

产品详情

胃镜消毒槽肠镜清洗槽 卫生部《内镜清洗技术规范(2004版)》 内窥镜专用流动水清洗槽 [全国医博会推荐专业生产厂家，专业品质，值得信赖！] 内窥镜清洗槽根据卫生部《内镜清洗消毒技术规范(2004版)》（卫医发100号）第十一条的要求精心研制而成。内窥镜清洗槽工作原理（流程）是通过流动水水洗、酶洗、消毒浸泡、流动水清洗，实现对内镜充分的清洗和消毒。内窥镜清洗消毒槽分为四槽和五槽两种基本型号，适用于对胃镜、肠镜、喉镜、气管镜、支气管镜等医用内镜的清洗。

产品特点：1、内窥镜清洗槽设计精巧、结构合理：无需通电，安全耐用；无需培训，操作简单（按照《规范》要求进行即可）。清洗槽、消毒槽进水以及槽下水均装有ABS球阀，对水的流量和流速进行自由调控；消毒槽上配有密封盖，有效防止消毒剂的挥发，保证消毒效果。2、完好配备上、下水管和接水龙头，客户只需5—10分钟即可全部安装完毕、投入使用。为方便医务人员的清洗消毒工作，内窥镜清洗槽下部特设有储存柜，可存放消毒试剂、手套等医疗器械。产品外观为珍珠白，晶莹剔透，美观大方，与医院整体色调完美融合。三、清洗步骤 四槽洗法：流水洗——酶洗——浸泡消毒（2%碱性戊二醛）——冲洗（喷洒）五槽洗法：流水洗——酶洗——清洗——浸泡消毒（2%碱性戊二醛）——冲洗（喷洒）胃镜、肠镜、十二指肠镜浸泡：不少于10分钟 支气管镜、喉镜浸泡不少于20分钟；等特殊感染患者使用后的内镜浸泡不少于45分钟。清洗方法和要求详见《内镜清洗技术规范(2004版)》