

CPM关节康复器@踝关节膝关节专用@下肢关节康复器

产品名称	CPM关节康复器@踝关节膝关节专用@下肢关节康复器
公司名称	石家庄三奥医疗器械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄市工农路238号
联系电话	0311-89682344 13303030651

产品详情

联系人：张女士 联系电话：15383013119 联系QQ：1914867798 淘宝旺旺：健康福满多8 诚信是财富之本
susu宝贝 网站：<http://www.120120shop.com> <http://www.sanao120.com> <http://www.6666sa.com>

<http://www.zhiliaoyi120.com> <http://www.refinewax.com> CPM下肢关节康复器膝踝两用增强型 产品介绍：

一、概述 关节康复运动器具有帮助手术后关节迅速恢复其活动的功能，恢复后的关节活动自如。而这款关节康复运动器就是提供一种新颖的物理疗法，采用滑膜关节持续被动活动理论，是与传统的康复手段所不同的术后 康复疗法。关节康复运动器系骨科康复性医疗器械，以持续被动运动（即 CONTINUES ASSIVE MOTION，简称CPM）理论为基础，通过模拟人体自然运动，激发人体的自然复原力，发挥组织代偿作用，进行下肢关节功能恢复训练，在临床应用上具有安全实用、无痛苦、病人乐于接受、关节活动范围大、有效消除关节粘连及坏死关节成活、伤口愈合和消肿、促进关节软骨损坏的自身修复，利于移植骨膜转化成透明关节软骨的优点。二、技术特点 1、数字化屏幕显示，操作简单。 2、主动记忆功能，即使在仪器关闭后仍然能记忆最近一次使用时的参数设置。 3、适用于不同身高者，对不同的腿长，可按需要对脚支架进行调节。 4、关节活动角度和速度调节范围大，操作灵活，可满足临床最大需要。 5、配上微电脑，实现控制智能化，使训练时间、速度、运动行程均可随意控制，运行安全可靠，并采用LCD显示运行过程。 6、采用国际先进优化设计，集国内外恢复器之长，具有运行平稳可靠，精度高，噪声低等特点。 7、具有病员手控开关（鼠标），病员在康复训练过程中，若感到不适，只要操作手控开关，便可使训练停止。 8、具有过载自动调头、自恢复保险丝双重保护功能。三、主要性能及参数 1、活动范围：膝关节-5°~120°，髌关节10°~90°，踝关节-10°~40° 2、运行速度范围：0~8°/S大范围无级调速； 3、设定工作时间：0~240分钟。 4、具有启动/停止控制功能，两个关节活动角度调节按键可使角度活动范围调节到最佳状态。 5、配有病员手控开关（鼠标）。 注意：复位前切忌把伤员关节搁置仪器上进行调节 1、开机：按电源开关，绿灯亮，机器自动复位。按启/停键机器开始工作。如要调整角度或定时，需重新启动机器，复位后再进行操作。所有调节完成后，按启/停键机器运行。 2、调整伸展角度：复位后按设置键,光标移到END处,然后按增大,减小键 到需要的最大角度 3、调整弯曲角度：复位后按设置键,光标移到STA处,然后按增大,减小键 到需要的最小角度

4、调整定时：复位后按设置键,光标移到TIM处,然后按增大,减小键到需要的定时时间

5、本机配备手控开关鼠标，左键是“伸展、弯曲”键，右键是“启/停”

键。在主机开机的情况下，病人可以根据需要，操作手控开关。

售后：机械与电子产品会因运输或使用不当造成损坏。对所售机器非人为损坏一年内出现质量问题包修。终身保修。