

病理组织脱水机SYD-T2070技术参数 誉德病理组织脱水机

产品名称	病理组织脱水机SYD-T2070技术参数 誉德病理组织脱水机
公司名称	沈阳誉德电子仪器有限公司
价格	.00/木箱
规格参数	
公司地址	沈阳沈阳市和平区三好街18-1号中润国际大厦D座1-9-1室
联系电话	024-23942118 13609889365

产品详情

誉德病理组织脱水机产品咨询热线400-024-5855 病理组织脱水机SYD-T2070技术参数: (1) 试剂缸: 12个, 其中最后3个缸为石蜡缸 (2) 抖动次数: 1次/15秒, 且抖缸时间可任意调整 (3) 搅拌次数: 1次/15秒 (4) 滴液停留时间为: 0秒~300秒可任意调节 (5) 单缸处理时间: 0~99小时可调节 (6) 单缸容积有: 2000mL、(根据所选机型选择) (7) 石蜡缸温度在室温~99 可调节 (8) 程序运行中, 标本进入蜡缸前4小时自动开始加温; 程序运行完毕后石蜡缸可保温5个小时 (9) 电源: AC220V ±10% 50Hz (10) 功率 500W 性能特点: (1) 全中文显示, 智能化程序控制, 操作简便 (2) 十五套以上程序可供编辑(可进行非顺序性编辑。) (3) 停电保护功能: 停电后自动切换到内置电源工作五个小时左右 (4) 程序记忆功能: 当失去工作电源时(包括内置电源), 机器会自动记忆失去电源时的工作状态, 恢复电源后可根据记忆自动完成程序 (5) 异常保护功能: 当设备出现卡缸故障时, 可自行判断并进行处理。如: 吊篮在第二缸出现卡缸时, 吊篮会自动进入第三缸, 当第三缸仍然卡缸时, 电脑进入保护程序, 让吊篮回到第一缸保护缸, 并记录于故障原因和故障位置, 以便了解故障原因 (6) 远程故障报警功能: 当设备出现二次卡缸时, 除电脑记录故障, 保护标本外, 机器能根据预先设置的电话号码拨打电话让工作人员知道机器出现故障, 以便及时处理 (7) 自动检测功能: 机器能自动快速检测对缸位置 (8) 复位功能: 机器的吊篮在任何位置能快速复位到第一缸 (9) 手动功能: 在程序运行中能插入手动, 以便添加标本. 也可随意进行手动加温 (10) 语音功能: 操作伴有语音提示 (11) 工作状态显示功能: 可随时查看机器的工作状态, 包括查看程序内容, 加温状态, 设置温度, 测量温度, 空气净化处理状态 (12) 水浴恒温控制. 双重温度保护功能: 能有效防止温度失控.(采用电脑控制与温度开关控制双重保护.) (13) 定时启动功能: 可随意设置: 年、月、日、时、分、秒进行定时启动, 做到休假与工作两不误 (14) 滴液停留时间可调. 可根据标本量与环境温度等调整滴液时间, 以保证试剂温度 (15) 抗干扰能力强: 防误操作。 (16) 外置直流电源接口, 加装电瓶可在无市电的情况下能完成整套工作程序。(包括加温) (17) 采用低压无触点加温控制技术, 延长设备的工作寿命 (18) 采用国际标准的同步齿形带传动, 耐高温, 耐腐蚀, 传动精确度高, 定位准确, 使用寿命 公司名称: 沈阳誉德电子仪器有限公司 联系人: 陶经理
地址: 沈阳市三好街18-1号中润国际大厦D座1-9-1室 电话: 400-024-5855 024-23942118 23944843 传真: 86-024-23930150 E-mail: syyunbo@vip.sina.com 网址: www.chinasyyd.com