

37度医用恒温箱 37 医用恒温柜 37摄氏度医用温箱

产品名称	37度医用恒温箱 37 医用恒温柜 37摄氏度医用温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74272.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

37度医用恒温箱 37 医用恒温柜 37摄氏度医用温箱产品说明-

产品广泛适用于医院手术室、输液室、急诊科、输血室、注射科等科室，用于对医用盐水、腹透液、甘露醇等各种输液的加温及恒温保存等。加热医用液体37度，有效解避免患者手术过程中低体温症出现，减少液体药品对身体的过激反应，降低伤口感染率，提升手术售后质量。已经成为手术室基本设备，符合各大医院使用需求。

37度医用恒温箱 37 医用恒温柜 37摄氏度医用温箱产品参数：

37度医用恒温箱 37 医用恒温柜 37摄氏度医用温箱使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过

低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

37度医用恒温箱 37 医用恒温柜 37摄氏度医用温箱相关-

静脉输注预先加温的液体预防全身下腹腔镜胆囊切除病人术中体温降低的保护作用.[方法]收集全身下行腹腔镜胆囊切除术病人124例,随机分为两组实验组采用液体加温仪对需要输注的液体加温,腹腔灌洗液体于37 恒温箱中加温.对照组不采取任何加强方式.术中持续监测病人的鼻咽部温度变化,记录病人入室时、入室后30 min、60 min、90 min、120min、150 min及手术结束时的体温.[结果]实验组病人入室后各时间点体温始终高于对照组,并在入室后60 min、90 min、120 min3个时间点的体温显著高于对照组.[结论]静脉输注预先加温的液体可保持病人体温,可预防术中病人体温下降,有利于促进术后恢复.37度医用恒温箱 37 医用恒温柜 37摄氏度医用温箱