

血压计臂式家用方便血压计什么牌子好

产品名称	血压计臂式家用方便血压计什么牌子好
公司名称	河南传承医疗器械公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州郑东新区商务外环路九如路王鼎国际大厦1002室
联系电话	0371-66758993 15890085326

产品详情

产品结构 电子血压计由便携式主机、袖带和电源适配器（选配）组成。适用范围

电子血压计适用与家庭及医院12岁以上成人血压测量。

本设备测得的血压值和听诊法的测量等价，其误差符合YY0670-2008A规定的要求。储存条件
包装后的血压计应储存在温度为 - 20~55 ，相对湿度不超过95%，无腐蚀气体和通风良好的室内。

安装和使用说明（一）装入电池或连接适配器 1、打开主机后面的电池盒盖。

2、装入四节AA（5号）干电池，注意电池正负极。3、关好电池盒盖。4、本机可选用电源适配器。使用前应确保电子血压计处于关机或未装入电池状态，而后将电源插头插入主机电源插孔，最后将适配器插头与市电连接。使用电源适配器时可以正常使用电子血压计。（二）电子血压计的连接

1、将气插嘴平稳插入主机袖带插孔，以牢固不漏气为宜。

2、将袖带末端送入另一端的金属环中，注意袖带的尼龙粘口面向外。（三）袖带的卷绑 1、将袖带卷绑在肘关节上侧1-2cm处。手心向上，橡胶管拉直后于手心平行。每次应在同一手臂上测量，建议裸臂测量，特别是脉搏较微弱者，2、把袖带的端部向外反拉折拉紧，并用尼龙粘扣固定在袖带外侧。

3、转动压紧尼龙扣，使袖带卷绑牢固。袖带卷绑以勉强插入一个手指为宜。

4、请参考袖带上注明的臂围范围，以确定是否采用了尺寸合适的袖带。（四）测量姿势 1、坐姿测量：

a) 坐正姿势。 b) 手心向上，手臂水平地放在椅子或桌子上。 c) 袖带应与心脏处于同一水平。

2、卧姿测量： a) 水平仰卧。 b) 自然伸直手臂，手掌向上。 c) 袖带与心脏位于同一水平。

注意1：测量时请确保袖带与心脏处于同一高度，高于或低于这个位置，精确度都会受到影响。

注意2：测量前应休息5分钟，测量过程中需保持舒适，稳定和安静。

注意3：不要转动身体或者电子血压计和挤压橡胶管。应避免乱动手臂。