

肛肠科多功能超声脉动清创机

产品名称	肛肠科多功能超声脉动清创机
公司名称	重庆腾跃医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	重庆腾跃:具有液体控温功能 MUI-K1/T8:有效超声工作频率40kHz ± 1kHz。 重庆:配备进口脚踏开关
公司地址	重庆市沙坪坝区都市花园中路80号附9号4-1 (注册地址)
联系电话	18339243155

产品详情

超声脉动清创术肛肠科的适用

- 1.适用于肛肠病手术中吸附脓液，污血和创面的坏死组织。
- 2.适用于肛肠手术后创面的换药处理。
- 3.用生理盐水冲洗清洁创面，去除创面的坏死组织以利于创面生长。
- 4.利用超声脉动作用均匀的将水雾化冲洗创面，减少对创面的刺激，减轻患者的痛苦。
- 5.可以根据患者创面的清洁需要适当的调配有针对性的药物，起到消炎灭菌的效果。
- 6.清洁创面时可负压吸引将创面的污水吸除干净。起到清洁创面的作用。
- 7.可以节省换药器械和敷料的消耗，省去不必要的器械消毒，节省经费。

肛门清创术中注意事项

- 1.伤口清洗是清创术的重要步骤，必须反复用大量生理盐水冲洗，务必使伤口清洁后再

作清创术。选用局麻者，只能在清洗伤口后麻醉。

2.清创时既要彻底切除已失去活力的组织，又要尽量爱护和保留存活的组织，这样才能避免伤口感染，促进愈合，保存功能。

3.组织缝合必须避免张力太大，以免造成缺血或坏死。

4.术中应彻底止血，否则手术后易发生血肿，有利于感染形成。切除失去生机的组织时，要避免过多地切除健康组织。如果是贯通伤，不要行来回拉锯状清理伤道，因此法不可能将失活组织及异物清除，反而可引起深部血管和神经的损伤。

5.肌肉清创时不能过多的剪除，否则有可能残留很大很深的死腔，愈合甚慢；清创后伤道要反复应用等渗盐水和过氧化化氢溶化氢溶液冲洗，对个别深达肢体主要血管和神经的损伤，清创后应用邻近正常组织覆盖，预防继发性大出血及神经压迫性损伤。

6.火器伤伤口因未能及时地得到处理，而发生感染时，不宜行彻底清创术，其主要目的在于切开深筋膜，以解除深部组织的张力，保证引流通畅，以扩大引流为主，清除明显易于取出的异物、血块或坏死组织，不作组织切除。

7.创口内用纱布疏松地充填引流，**用长条大纱布，不用小纱布，以免在后送过程中，因情况不明而被遗留在创腔深部，造成久治不愈的感染灶。纱布填塞不宜过紧，也不宜使用凡士林油纱布条，以免影响引流。贯通伤入口与出口匀应引流，盲管伤必要时作对口引流。

8.减少医源性交叉感染。

超声脉动清创机的特点：

1.配备了超声水雾化冲洗装置

2.配备了脉动压力清洗装置

3.配备了负压吸引装置（负压瓶、负压管）

4.配备了触控式液晶屏幕，操作简便。