

鱼跃超声雾化器

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 鱼跃超声雾化器 |
| 公司名称 | 湖北九州医疗器械有限公司 |
| 价格 | 320.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省武汉市汉阳大道邱家大湾 |
| 联系电话 | 86-02784669787 13477050810 |

产品详情

鱼跃雾化器402AI 320.00/台 鱼跃空气压缩雾化器430A 560.00/台

超声雾化器402A能将水溶剂药物雾化成极微小的雾粒，作为病人气雾吸入治疗或表面病灶喷药治疗，对鼻炎、咽炎、急慢性支气管炎、肺气肿、哮喘、肺部或皮肤感染等有显著疗效，是国内外医院内外科、儿科、五官科、皮肤科以及养老院等单位必备的**医疗设备**。产品类别：医用电子设备系列
雾化器使用方法 A、开机前准备 1、开关、旋钮放至适当位置 2、水槽加水（350ML）
3、雾化杯内注入药液，逆顺序装好透明塑料各部件 鱼跃雾化器产品用途：

（一）该产品是一种多功能雾化治疗机。它能在常温下，把水溶剂药物，雾化成其微小雾粒，供病人吸入治疗。（二）该机雾粒直径，最小达0.2微米，可随皮肤呼吸渗透人体细胞内。（三）对鼻炎、咽炎、气管炎等呼吸道感染及皮肤病，术后化痰等，用雾化器，可把药直接送到患处，见效快、疗程短，避免打针、吃药带来的副作用。（四）可空气消毒加湿，净化空气中的浮尘物。

（五）可美容，能使多种维生素液，渗透到肌肤深层，为肌肤提供充足水份营养。鱼跃雾化器开机工作
1、打开电源开关，电源指示灯亮，风机工作（如水槽内水位过低或没加水，此时水位指示灯亮、报警声响，请关机加水）。2、雾量控制旋钮，风量调节旋钮至自定要求（雾量控制、风量调节旋钮最佳设置：雾量控制旋钮旋至最大，风量调节旋钮置大小变化段的中间位置，此时雾浓，药液利用率高。如要求送雾快、雾化率大，可加大风量）并把咬嘴或面罩接至病人。（根据需要可使用定时器）。
3、若雾化的药液量少，请调小雾量和风量旋钮至送出薄雾即可，或请遵医嘱。4、药液雾化完后，逆时针旋开雾化杯上盖，取雾化杯时，应防止水滴入风道口，如不慎将水或药液滴入风道，（机箱通风口下有“—”30mL水槽，水槽有排水孔）水可及时排出机外。（严禁大量的水涌入风道口，如发生应关机，并切断电源将机器后侧提高，将余水从排水管排出机外，并打开机箱检查）超声雾化器使用后整理 关机后取下雾化杯水槽上盖，讲本机头部倾斜倒出水槽内的水，并擦净水槽和晶片（防止氧化和积垢，否则将影响晶片寿命），若连续使用可不倒水，但一天工作完应将水槽内水倒净